

DIN アダプタ

【形状・構造及び原理等】

形状



構造・構成ユニット

1. 本製品はケーブル側コネクタと電極側コネクタからなる。

カタログ番号	品名
414370-001	DIN アダプタ 5 リード
414370-012	12 リード DIN アダプタキット
414371-001	DIN アダプタ 3 リード
2024185-001	DIN アダプタ 10 リード

2. 使用環境条件(標準環境)

周囲温度: 10~40℃

相対湿度: 30~85%

【使用目的又は効果】

患者の心電図信号を心電計(ECG)に伝達する装置をいう。
本製品は、あるパターンに従って電極を用いて胸部に取り付ける。

【使用方法等】

使用方法

1. DIN アダプタをマルチリンクケーブルにしっかりと装着する。
2. DIN コネクタ付心電図リード線を DIN アダプタの各リード位置を確認しながら、しっかりと装着する。
3. 取り外す際は DIN アダプタをしっかりと持ち、心電図リード線の DIN コネクタ部分やマルチリンクケーブルの集中コネクタ部を保持してゆっくりと取り外すこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- ・保管条件
周囲温度: -10~60℃
相対湿度: 10~95%(結露なきこと)

使用期間

1 年[自己認証(当社データによる)]
但し、これは推奨された環境で使用された場合で、使用状況により差異が生じることがある。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

1. 目視による点検
 - (1) 外観の確認
製品の外観に異常がないことを確認すること。
 - ・損傷や摩耗がないこと。
 - (2) 清浄性の確認
清浄な状態であることを確認すること。
 - (3) 機能の確認
製品の正常状態の確認
正常状態・正常動作を確認すること。
 - ・異音、異臭がないことを確認すること。
 - (4) 安全機能の確認
全てのケーブルやコネクタが安全にセットされているか確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

住所: 〒191-8503 東京都日野市旭が丘 4-7-127

お問い合わせ先: 消耗品受注センター
電話: 0120-187-855
FAX: 042-582-6923

製造業者: ジーイーメディカルシステムズ
インフォメーションテクノロジーズ インク
(GE Medical Systems Information
Technologies, Inc.)

国名: アメリカ合衆国

社内部品番号: 5797398

取扱説明書を必ずご参照ください。