

マルチリンク ECG リード

(ML3LD)

【禁忌・禁止】

併用医療機器

磁気共鳴画像診断装置(MRI)環境下では使用しないこと。
詳細については相互作用の項を参照すること。

【形状・構造及び原理等】

形状



製品の外観
(マルチリンク ECG リード ML スナップ 3 リード)

構造・構成ユニット

本製品は電極接続部、リード線、差し込み式のコネクタ部からなる心電図リードである。

カタログ番号	品名
411203-003	マルチリンク ECG リード ML スナップ 3 リード 74cm
411203-004	マルチリンク ECG リード ML スナップ 3 リード 130cm
412682-003	マルチリンク 3 リード ワイヤセット 74cm IEC
412682-004	マルチリンク ECG リード ML グラバー 3 リード 130cm

【使用目的又は効果】


使用目的

患者の心電図信号を心電計(ECG)に伝達する装置をいう。
本製品は、あるパターンに従って電極を用いて胸部に取り付ける。

【使用方法等】

使用方法

- マルチリンク ECG ケーブルにリード線を取り付けるには、ECG ケーブルのコネクタに、リード線のピンを合わせてしっかり差し込むこと。
- 電極装着部を電極の端子に装着する。
電極装着部の色に注意し、該当する電極の位置に合わせて装着すること。
- 心電図ケーブルからリード線を取り外すには、結合器の固い部分をしっかり持って抜くこと。

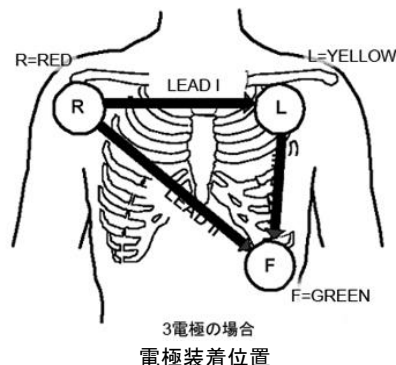

【使用上の注意】

重要な基本的注意

当社指定以外の装置と組み合わせて使用しないこと。

相互作用

併用禁忌(併用しないこと)

磁気共鳴画像診断装置(MRI)環境下では使用しないこと。
[誘導起電力による局所的な発熱で被験者が火傷を負うことおそれがあるため]

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

周囲温度： -10～60℃
相対湿度： 10～95%(結露なきこと)

使用期間

1年[自己認証(当社データによる)]
但し、これは推奨された環境で使用された場合で、使用状況により差異が生じることがある。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

- 目視による点検
 - 外観の確認
製品の外観に異常がないことを確認すること。
・ 損傷や摩耗がないこと。
 - 清浄性の確認
清浄な状態であることを確認すること。
・ 本製品使用後は酒精綿で清拭して保管すること。
滅菌する場合は、オートクレーブ滅菌を避け、EOG 滅菌にて滅菌すること。
- 機能の確認
 - 製品の正常状態の確認
正常状態・正常動作を確認すること。
・ 異音、異臭がないことを確認すること。
 - 安全機能の確認
全てのケーブルやコネクタが安全にセットされているか確認すること。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

住所： 〒191-8503 東京都日野市旭が丘 4-7-127

お問い合わせ先： 消耗品受注センター

電話： 0120-187-855

FAX： 042-582-6923

製造業者： ジーイー ヘルスケア インフォメーション

テクノロジーズ インク

(GE Medical Systems Information

Technologies,Inc)

国名： アメリカ合衆国

製造業者： ジーイー ヘルスケア フィンランド

オーワイ

(GE Healthcare Finland Oy)

国名： フィンランド共和国

社内部品番号： 5797402