

ECG アダプタケーブル

【禁忌・禁止】

併用医療機器

MRI での使用は絶対に行わないこと。
[誘導起電力による局所的な発熱で被験者が火傷を負うことがあるため]

【形状・構造及び原理等】

形状



製品の外観

構造・構成ユニット

カタログ番号	品名
2041303-001	ECG アダプタケーブルデュアルピン DIN レセプタクル

作動・動作原理

本製品は当社製の心臓カテーテル用検査装置並びに心電計用の ECG 測定用アダプタケーブルである。
本製品は DIN 対応の ECG ケーブルと DIN コネクタ付電極を接続して、患者の心電図信号を主として導出する。
診療所、病院において、心電図を計測し不整脈、虚血性心疾患、心室肥大等の診断の補助に使用する。

【使用目的又は効果】

患者の心電図信号を心電計(ECG)に伝達する装置をいう。
本製品は、あるパターンに従って電極を用いて胸部に取り付ける。

【使用方法等】

使用方法

- リード線付電極の DIN コネクタ部を ECG アダプタケーブルのリード線接続部に確実に差し込むこと。
- リード線付電極の装着部の色に注意し、ECG アダプタケーブルのコネクタ部を ECG ケーブルの該当するコネクタ箇所確実に接続する。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・ 当社指定以外の装置と組み合わせて使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

周囲温度: -10～60℃
相対湿度: 10～95%(結露なきこと)

使用期間

1 年[自己認証(当社データによる)]。
但し、これは推奨された環境で使用された場合で、使用状況により差異が生じることがある。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

- 目視による点検
 - 外観の確認
製品の外観に異常がないことを確認すること。
 - ・ 損傷や摩耗がないこと。
 - 清浄性の確認
清浄な状態であることを確認すること。
 - 清掃、消毒、滅菌等については以下の事項に従って行うこと。
 - 洗浄は中性洗剤や石鹼水を湿らせた布で拭拭すること。
 - 消毒液(例: エタノール、プロパノール、フェノール系消毒液、Cidex などのアルデヒド、塩素系消毒液)を使用可能である。但し、次亜塩素酸は使用しないこと。
 - 滅菌する場合は、最高温度 50℃以下で EOG 滅菌にて滅菌すること。
 - 本製品は液体に浸さないこと。強度の紫外線から保護すること。
- 機能の確認
 - ・ 製品の正常状態の確認
正常状態・正常動作を確認すること。
 - ・ 異音、異臭がないことを確認すること。
- 安全機能の確認
全てのケーブルやコネクタが安全にセットされているか確認すること

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

住所: 〒191-8503 東京都日野市旭が丘 4-7-127

保守サービス連絡先: 消耗品受注センター

電話: 0120-187-855

FAX: 042-582-6923

製造業者: ジーイーメディカルシステムズ
インフォメーションテクノロジーズ
インク
(GE Medical Systems Information
Technologies, Inc.)

国名: アメリカ合衆国

社内部品番号: 5794238

取扱説明書を必ずご参照ください。