

一般医療機器 心電計ケーブル及びリード JMDN 35562010

ECG コネクタ (CAM14、AM4/5 用)

【形状・構造及び原理等】

形状



製品の外観

構造・構成ユニット

1. 本製品はモニタ接続部、リード線接続部からなる ECG 測定用ケーブルである。

カタログ番号	品名
900178-101	ECG コネクタ CAM14,AM4/5 用バナナ 10
900178-102	ECG コネクタ CAM14,AM4/5 用ワニ口 10
900178-103	ECG コネクタ CAM14,AM4/5 用グラパー10
900178-201	ECG コネクタ CAM14,AM4/5 用バナナ 14
900178-202	ECG コネクタ CAM14,AM4/5 用ワニ口 14
900178-203	ECG コネクタ CAM14,AM4/5 用グラパー14

2. 使用環境条件(標準環境)

周囲温度： 10～40℃

相対湿度： 30～85%

作動・動作原理

本製品は当社製心電計等の ECG 測定用コネクタである。本製品と共に ECG リードワイヤセット、及び ECG 電極を用いて患者の心電図信号を主として心電計(ECG)に伝達する。診療所、病院において心電図を計測し不整脈、虚血性心疾患、心室肥大等の診断の補助に使用する。


【使用目的又は効果】

患者の心電図信号を心電計(ECG)に伝達する装置をいう。本製品は、あるパターンに従って電極を用いて胸部に取り付ける。

【使用方法等】

使用方法

1. ECG コネクタとリードワイヤを取り付けるには、ECG コネクタのリード線接続部をリードワイヤの接続口に合わせて確実に差し込むこと。
2. ECG コネクタの電極接続部に電極を装着する。プラグの色に注意し、該当する電極の位置に合わせて装着すること。

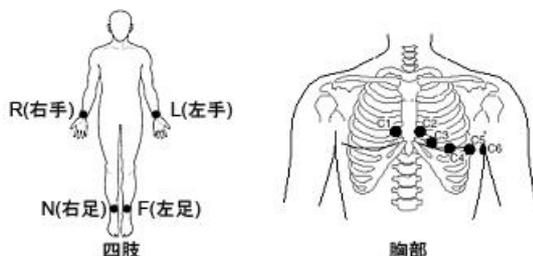

電極装着位置

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・ 当社指定以外の装置と組み合わせて使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

周囲温度： -10～60℃

相対湿度： 10～95%(結露なきこと)

使用期間

1年[自己認証(当社データによる)]

但し、これは推奨された環境で使用された場合で、使用状況により差異が生じることがある。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

1. 目視による点検

(1) 外観の確認

製品の外観に異常がないことを確認すること。

- ・ 損傷や摩耗がないこと。

(2) 清浄性の確認

清浄な状態であることを確認すること。

- ・ 本製品使用後は酒精綿で清拭して保管すること。

滅菌する場合は、オートクレーブ滅菌を避け、EOG 滅菌にて滅菌処理すること。

(3) 機能の確認

- ・ 製品の正常状態の確認

正常状態・正常動作を確認すること。

- ・ 異音、異臭がないことを確認すること。

(4) 安全機能の確認

全てのケーブルやコネクタが安全にセットされているか確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

住所： 〒191-8503 東京都日野市旭が丘 4-7-127

お問い合わせ先： 消耗品受注センター

電話： 0120-187-855

FAX： 042-582-6923

製造業者： ジーイー ヘルスケア インフォメーション

テクノロジーズ

(GE Medical Systems Information Technologies)

国名： アメリカ合衆国

社内部品番号： 5796172

取扱説明書を必ずご参照ください。