

プルッカ用 ECG ケーブル

【禁忌・禁止】

併用医療機器

磁気共鳴画像診断装置(MRI)環境下では使用しないこと。
[誘導起電力による局所的な発熱で被験者が火傷を負うことがあるため]

【形状・構造及び原理等】

*形状



構造・構成ユニット

カタログ番号	品名	長さ
2003419-001	ECG 患者ケーブル 10ft	3m
2003420-001	ECG 患者ケーブル 15ft	4.6m
2003421-001	ECG リード線	90cm

・使用環境条件(標準環境)

周囲温度: 5~35℃

相対湿度: 10~90%

作動・動作原理

本製品は、当社製 Prucka 心臓カテーテルモニタリングシステム(以下本文書では本体という)の ECG 測定用ケーブルである。

本製品と共に ECG リードワイヤー、及び ECG 電極を用いて、患者の心電図信号を伝達する。

【使用目的又は効果】

患者の心電図信号を心電計(ECG)に伝達する装置をいう。本製品は、あるパターンに従って電極を用いて胸部に取り付ける。

【使用方法等】

使用方法

・ ECG 患者ケーブル(以下本欄ではケーブルという)、及び ECG リード線(以下本欄ではリード線という)を次に示す接続部に接続して使用する。

(1) ケーブルのモニター接続部を本体構成品の C ラボ II プラスのアンプに接続する。

(2) リード線の接続部をケーブルのタッチブルーフコネクタ接続部(10 電極)に接続する。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

・ 当社指定以外の装置に使用しないこと。
[当社指定以外の装置と接続し、その装置に起因する故障や不具合が発生するおそれがあるため]

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

・ 保管条件

周囲温度: -20~55℃

相対湿度: 0~85%(結露なきこと)

使用期間

1 年[自己認証(当社データによる)]

但し、これは推奨された環境で使用された場合で、使用状況により差異が生じることがある。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

1. 本製品を使用する前に、損傷、劣化、異常等が無い目視点検を行うこと。
2. 本製品使用後は酒精綿で清拭して保管すること。
滅菌する場合は、オートクレーブ滅菌を避け、EOG 滅菌にて滅菌すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

住所: 〒191-8503 東京都日野市旭が丘 4-7-127

お問い合わせ先: 消耗品受注センター

電話: 0120-187-855

FAX: 042-582-6923

製造業者: コンメド コーポレーション
(ConMed Corporation)

国名: アメリカ合衆国

社内部品番号: 5903971

取扱説明書を必ずご参照ください。