

## ディスプレイ電極 BioZ ICG

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

##### 使用方法


本製品はディスプレイサブル品のため、再使用は行わないこと。

##### 併用医療機器

磁気共鳴画像診断装置(MRI)環境下では使用しないこと。  
[誘導起電力による局所的な発熱で被験者が火傷を負うことがあるため]

#### 【形状・構造及び原理等】

##### 形状

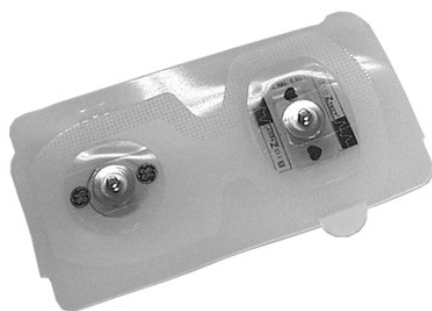

製品の外形

1. 本製品は体表面に装着し心臓の活動電位を電気信号として導出するためのセンサーである。

| カタログ番号      | 品名                |
|-------------|-------------------|
| 2006412-001 | ディスプレイ電極 BioZ ICG |

2. 使用環境条件(標準環境)  
周囲温度: 10~40℃  
相対湿度: 30~85%

##### 作動・動作原理

本製品は体表面に設置し、心臓の活性電位の一部である心拍出量を体表の電気信号として導出するためのセンサーである。また、裏面に塗布されている粘着ゲルは、電極を皮膚に固定すると共に生体との接触抵抗を低く保つために使用される。

#### 【使用目的又は効果】

##### 使用目的


体表に設置し体表の電気信号を処理装置(心臓の電気活動をグラフで表示する)に伝達する導体をいう。  
この電気活動を記録する一般的な装置は心電計(ECG)である。

#### 【使用方法等】

##### 使用方法

1. 皮膚の前処理としては、本製品の貼付部を事前に清潔にし乾燥させ、油分を取り除くこと。  
分けることが難しい濃い、あるいはカールした体毛部は除毛すること。

2. ケーブルを装置本体の接続口に合わせてしっかり差し込むこと。
3. ケーブルの電極接続部に本製品を装着する。  
端子の色に注意し、該当する電極の位置に合わせて装着すること。
4. 本製品を剥がす際は、本製品の端よりゆっくりと剥がすこと。

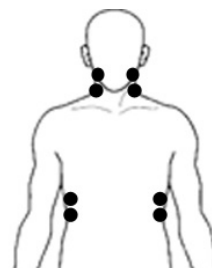

電極装着位置

#### 【使用上の注意】

##### 重要な基本的注意

1. 本製品は、皮膚障害のある部位には貼らないこと。  
[皮膚が損傷する恐れがあるため]
2. 皮膚に発赤、腫れ等の症状が現れたときは使用を中止すること。[肌が弱い患者に対して症状が現れることがあるため]
3. 他の型式の電極と混在して使用しないこと。  
[安定した波形を得られないことがあるため]
4. 有効期間を過ぎた電極は使用しないこと。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 保管方法

1. 保管条件  
周囲温度: -10~60℃  
相対湿度: 10~95%(結露なきこと)
2. 本製品開封後は、ゲルが乾燥しやすいので早めに使用すること。
3. 本製品開封後に残った電極は、乾燥しないよう、パッケージの端を折って保管すること。

##### 有効期間

外箱、及びパック毎に記載。  
但し、これは推奨された環境で使用された場合で、使用状況により差異が生じることがある。

#### 【保守・点検に係る事項】

##### 使用者による保守点検事項

- (1) 外観の確認  
製品の外観に異常がないことを確認すること。
  - ・ 損傷や摩耗がないこと。
- (2) 清浄性の確認  
清浄な状態であることを確認すること。
- (3) 機能の確認  
・ 製品の正常状態の確認  
正常状態・正常動作を確認すること。
  - ・ 異音、異臭がないことを確認すること。
- (4) 安全機能の確認  
全てのケーブルやコネクタが安全にセットされているか確認すること。

取扱説明書を必ずご参照ください。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

住所： 〒191-8503 東京都日野市旭が丘 4-7-127

お問い合わせ先： 消耗品受注センター

電話： 0120-187-855

FAX： 042-582-6923

製造業者： ジーイーメディカルシステムズ  
インフォメーション テクノロジーズ  
インク

(GE Medical Systems Information  
Technologies, Inc.)

国名： アメリカ合衆国

社内部品番号： 5791169