

一般医療機器 心電計ケーブル及びリード JMDN 35562010

SEER12 用 12ch 心電図ケーブル 10 リード

【禁忌・禁止】

併用医療機器

磁気共鳴画像診断装置(MRI)環境下では使用しないこと。
[誘導起電力による局所的な発熱で被験者が火傷を負うことがあるため]

【形状・構造及び原理等】

形状



製品の外観

構造・構成ユニット

1. 本製品は心電計ケーブル、及びリード線から構成される。

カタログ番号	品名
2014606-202	SEER12 用 12ch 心電図ケーブル 10 リード
2014606-635	SEER12 用 12ch 心電図ケーブル 10 リード
2014606-637	SEER12 用 12ch 心電図ケーブル 10 リード

2. 使用環境条件(標準環境)

周囲温度: 0~45℃

相対湿度: 5~95%

作動・動作原理

本製品は、ホルタ心電計用の ECG 測定用ケーブルである。本製品と共に ECG 電極を用いて患者の心電図信号を主として導出する。

患者の心電図データを計測し不整脈、虚血性心疾患、心室肥大等の診断の補助に使用する。

【使用目的又は効果】


使用目的

患者の心電図信号を心電計(ECG)に伝達する装置をいう。
本製品は、あるパターンに従って電極を用いて胸部に取り付ける。

【使用方法等】

使用方法

1. 電極を貼る部分を剪毛し患者皮膚を清拭し乾燥させる。
2. リード線の電極接続部を電極の端子に装着する。
3. 患者の胸部の正しい位置に電極を貼り電極接続部の表示を確認し該当する電極の位置に合わせて接続する。

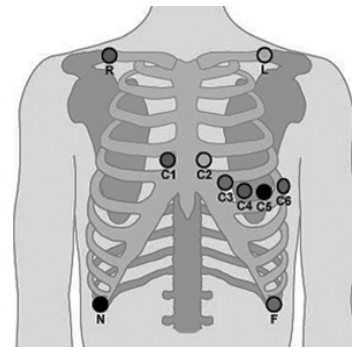

胸部電極装着位置

【使用上の注意】

重要な基本的注意

当社指定以外の装置と組み合わせて使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

周囲温度: -20~65℃

相対湿度: 5%~95%(結露なきこと)

使用期間

1 年[自己認証(当社データによる)]

但し、これは推奨された環境で使用された場合で、使用状況により差異が生じることがある。

【保守・点検に係る事項】

1. 目視による点検

(1) 外観の確認

製品の外観に異常がないことを確認すること。

・ 損傷や摩耗がないこと。

(2) 清浄性の確認

清浄な状態であることを確認すること。

・ 本製品使用後は酒精綿で清拭して保管すること。

滅菌する場合は、オートクレーブ滅菌を避け、EOG 滅菌にて滅菌処理すること。

(3) 機能の確認

・ 製品の正常状態の確認

正常状態・正常動作を確認すること。

・ 異音、異臭がないことを確認すること。

(4) 安全機能の確認

全てのケーブルやコネクタが安全にセットされているか確認すること。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

住所：〒191-8503 東京都日野市旭が丘 4-7-127

お問い合わせ先： 消耗品受注センター

電話： 0120-187-855

FAX： 042-582-6923

製造業者： ゲートメド メディツィン アンド
インフォメーションズ テクニク エーゲー
(getemed Medizin-und Informationstechnik
AG)

国名： ドイツ連邦共和国

社内部品番号： 5791161