

心電計用 ECG ケーブルセット (GE)

(リードワイヤーセット)

【禁忌・禁止】

併用医療機器

*磁気共鳴画像診断装置(MRI)の使用または MRI 環境の中で本製品を使用しないこと。[相互作用の項参照]

【形状・構造及び原理等】

*形状



2104724-002



**2104724-006



**2104724-007



2104750-001



**2104750-002



2104748-001



2104725-002



*2104752-001



**2104752-002

製品の外観

*構造・構成ユニット

1. 本製品は電極接続用コネクタ部、リード部、コネクタ部から構成される心電図リードワイヤーである。

カタログ番号	品名
2104724-002	バナナプラグ式、IEC リードワイヤーセット、10 リード
**2104724-006	バナナプラグ式、IEC リードワイヤーセット、10 リード、1020mm
**2104724-007	バナナプラグ式、IEC リードワイヤーセット、10 リード、1400mm
2104750-001	バナナプラグ式、IEC-HEIM リードワイヤーセット、アドオン
**2104750-002	バナナプラグ式、IEC-HEIM リードワイヤーセット、アドオン
2104748-001	グラバー式、IEC リードワイヤーセット、10 リード
2104725-002	グラバー式、IEC-HEIM リードワイヤーセット、アドオン
*2104752-001	バナナ式、AHA リードワイヤーセット、小児用、3 リード
**2104752-002	バナナ式、AHA リードワイヤーセット、小児用、3 リード

2. 使用環境条件

周囲温度： -40～70℃

相対湿度： 10～95%

*動作・動作原理

本製品は心電計用の ECG 測定用リードワイヤーである。ECG リード、及び ECG 電極を用い、心電図を計測し不整脈、虚血性心疾患、心室肥大の診断の補助に使用する心電図を計測するために、被検者の心電図信号を導出する。

【使用目的又は効果】

使用目的

被検者の心電図信号を心電計(ECG)に伝達する装置をいう。本製品は、あるパターンに従って電極を用いて胸部に取り付ける。

【使用方法等】

*使用方法

1. 製品の互換性、性能、内容を確認する。
2. ECG ケーブルを ECG モニター(心電計)に接続する。
3. リードワイヤーを電極に接続する。
4. 電極の適用を行うために被験者の皮膚面を出しておく。
5. 端子の色に注意し、ECG 電極を被験者の正しい位置に取り付ける。

**組み合せて使用可能な医療機器

一般的名称	販売名	承認/認証/ 届出番号
再使用可能な心電電極	ECG リューザブル電極 (GE)	13B1X001 50CS0070
単回使用電極	ディスポーザブル電極 (GE)	13B1X001 50CS0069
心電計ケーブル及びリード	ECG ケーブルコネクタ (GE)	13B1X001 50CS0072

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・ 当社指定以外の装置と組み合わせて使用しないこと。

相互作用

併用禁忌(併用しないこと)

医療機器 の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
MRI 装置	磁気共鳴画像診断装置(MRI)環境下では使用しないこと	誘導起電力による局所的な発熱で被験者が火傷を負うおそれ

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

周囲温度： -40～70℃
相対湿度： 10～95%

使用期間

1 年[自己認証(当社データによる)]

但し、これは推奨された環境で使用された場合で、使用状況により差異が生じることがある。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

1. 目視による点検

(1) 外観の確認

- ・ 製品の外観に異常がないことを確認すること。
- ・ 損傷や摩耗がないこと。

* (2) 清浄性の確認

- ・ 清浄な状態であることを確認すること。
- ・ 洗浄方法および洗浄剤については取扱説明書に従うこと。
- ・ 推奨されている以外の洗浄液を使用しないこと。
- ・ 洗浄後は完全に乾燥するまで使用しないこと。

2. 機能の確認

(1) 製品の正常状態の確認・正常状態

- ・ 正常動作を確認すること。
- ・ 異音、異臭がないことを確認すること。

(2) 安全機能の確認

- ・ 全てのケーブルやコネクタが安全にセットされているか確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

住所： 〒191-8503 東京都日野市旭が丘 4-7-127

お問い合わせ先： 消耗品受注センター

電話： 0120-187-855

FAX： 042-582-6923

製造業者： シェンチェン ラウンチ エレクトリカル
コリミティッド

(Shenzhen Launch Electrical Co., Ltd.)

国名： 中華人民共和国

取扱説明書を必ずご参照ください。