

心電計用 ECG ケーブルセット (GE)

(バリューケーブル 10 リード)

【禁忌・禁止】

併用医療機器

*磁気共鳴画像診断装置(MRI)の使用または MRI 環境の中で本製品を使用しないこと。[相互作用の項参照]

【形状・構造及び原理等】

形状

2104726-001



2104727-001



製品の外観

構造・構成ユニット

1. 本製品は心電計ケーブル、及びリード線から構成される。

カタログ番号	製品概要
2104726-001	バナナプラグ式 IEC バリューケーブル 10 リード
2104727-001	バナナプラグ式 AHA バリューケーブル 10 リード

2. 使用環境条件

周囲温度: -40~70℃

相対湿度: 10~95%

作動・動作原理

ECG 電極、ECG リード、ECG ケーブルを用いて、不整脈、虚血性心疾患、心室肥大の診断の補助に使用する心電図を計測するために、患者の心電図信号を導出する。

【使用目的又は効果】


使用目的

患者の心電図信号を心電計(ECG)に伝達する装置をいう。本製品は、あるパターンに従って電極を用いて胸部に取り付ける。

【使用方法等】

*使用方法

1. 製品の互換性、性能、内容を確認する。
2. ECG ケーブルを ECG モニター(心電計)に接続する。
3. リードワイヤーを電極に接続する。
4. 電極の適用を行うために被験者の皮膚面を出しておく。
5. 端子の色に注意し、ECG 電極を被験者の正しい位置に取り付ける。

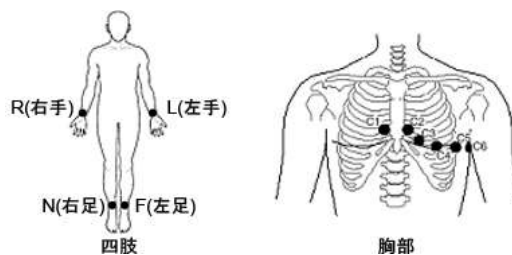

電極装着位置

**組み合せて使用可能な医療機器

一般的名称	販売名	承認/認証/ 届出番号
再使用可能な 心電用電極	ECG リューザブル電極 (GE)	13B1X001 50CS0070
心電計ケー ブル及びリード	ECG ケーブルコネクタ (GE)	13B1X001 50CS0072

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・ 当社指定以外の装置と組み合わせて使用しないこと。

相互作用

併用禁忌(併用しないこと)

医療機器 の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
MRI 装置	磁気共鳴画像診断装置(MRI)環境下では使用しないこと	誘導起電力による局所的な発熱で被験者が火傷を負うおそれ

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

周囲温度： -40～70℃
相対湿度： 10～95%(結露なきこと)

使用期間

1 年[設計元データによる]
但し、これは推奨された環境で使用された場合で、使用状況により差異が生じることがある。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

1. 目視による点検
 - (1) 外観の確認
 - ・製品の外観に異常がないことを確認すること。
 - ・損傷や摩耗がないこと。
 - * (2) 清浄性の確認
 - ・清浄な状態であることを確認すること。
 - ・洗浄方法および洗浄剤については取扱説明書に従うこと。
 - ・推奨されている以外の洗浄液を使用しないこと。
 - ・洗浄後は完全に乾燥するまで使用しないこと。
2. 機能の確認
 - (1) 製品の正常状態の確認
 - ・正常状態・正常動作を確認すること。
 - ・異音、異臭がないことを確認すること。
 - (2) 安全機能の確認
 - ・全てのケーブルやコネクタが安全にセットされているか確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

住所： 〒191-8503 東京都日野市旭が丘 4-7-127

お問い合わせ先： 消耗品受注センター
電話： 0120-187-855
FAX： 042-582-6923

製造業者： シェンチェン ラウンチ エレクトリカル
コリミティッド
(Shenzhen Launch Electrical Co., Ltd.)

国名： 中華人民共和国