

ECG ケーブルコネクタ (GE)

(ワイドマウスアダプタクリップ)

【禁忌・禁止】

併用医療機器

磁気共鳴画像診断装置(MRI)環境下では使用しないこと。
詳細については【使用上の注意】相互作用の項を参照すること。

【形状・構造及び原理等】

形状



製品の外観

- 本製品は電極接続部、及びバナナプラグ接続部からなる ECG(心電図)測定用のコネクタである。

カタログ番号	品名
2104729-001	アダプタクリップ、ワイドマウスクリップ、14 個

作動・動作原理

本製品は心電計等の ECG 測定用コネクタである。
本製品と共に ECG リードワイヤーセット、及び ECG 電極を用いて患者の心電図信号を主として心電計に伝達する。
診療所、病院において心電図を計測し不整脈、虚血性心疾患、心室肥大等の診断の補助に使用する。

【使用目的又は効果】

使用目的

患者の心電図信号を心電計(ECG)に伝達する装置をいう。
本製品はあるパターンに従って電極を用いて胸部に取り付ける。

【使用方法等】

使用方法

- 電極を貼る部分を剪毛後、患者皮膚を清拭し乾燥させる。
- リード線のバナナプラグを、バナナプラグ接続部に装着する。
- 患者の胸部の正しい位置に電極を貼り、バナナプラグの数字並びにアルファベットに注意して、該当する電極の位置に合わせて接続する。
スナップ電極については、本品底面の凹みに電極の突起をはめ、タブ電極については本品のクリップ部分ではさむ。
- 心電図の計測が終了したら、アダプタを電極から取り外す。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 本製品を液体に触れさせないこと。
[クリップが錆びるなどの損傷のおそれがあるため]

相互作用

併用禁忌(併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
MRI 装置	磁気共鳴画像診断装置(MRI)環境下では使用しないこと	誘導起電力による局所的な発熱で被験者が火傷を負うおそれ

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

周囲温度: -40~70℃
相対湿度: 10~95%(結露なきこと)

使用期間

1 年[設計元データによる]
但し、これは推奨された環境で使用された場合で、使用状況により差異が生じることがある。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

- 目視による点検
 - 外観の確認
 - 製品の外観に異常がないことを確認すること。
 - 損傷や摩耗がないこと。
 - 清浄性の確認
 - 清浄な状態であることを確認すること。
 - 本品の洗浄/消毒および洗浄/消毒剤については取扱説明書に従うこと。
 - 洗浄後は完全に乾燥するまで使用しないこと。
- 機能の確認
 - 正常状態・正常動作を確認すること。
- 安全機能の確認
 - 全てのケーブルやコネクタが安全にセットされているか確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

住所: 〒191-8503 東京都日野市旭が丘 4-7-127

お問い合わせ先: 消耗品受注センター
電話: 0120-187-855
FAX: 042-582-6923

製造業者: シェンチェン ラウンチ エレクトリカル
コリミティッド
(Shenzhen Launch Electrical Co., Ltd.)
国名: 中華人民共和国

社内部品番号: 5929836

取扱説明書を必ずご参照ください。

5929836