

## ECG ケーブルコネクタ (GE)

(ワイドマウスアダプタクリップ)

### 【禁忌・禁止】

#### 併用医療機器

磁気共鳴画像診断装置(MRI)環境下では使用しないこと。  
詳細については【使用上の注意】相互作用の項を参照すること。

### 【形状・構造及び原理等】

#### 形状



製品の外形

- ・本製品は電極接続部、及びバナナプラグ接続部からなる ECG(心電図)測定用のコネクタである。

カタログ番号	品名
2104729-001	アダプタクリップ、ワイドマウスクリップ、14 個

#### 作動・動作原理

本製品は心電計等の ECG 測定用コネクタである。  
本製品と共に ECG リードワイヤーセット、及び ECG 電極を用いて患者の心電図信号を主として心電計に伝達する。  
診療所、病院において心電図を計測し不整脈、虚血性心疾患、心室肥大等の診断の補助に使用する。

### 【使用目的又は効果】

#### 使用目的

患者の心電図信号を心電計(ECG)に伝達する装置をいう。  
本製品はあるパターンに従って電極を用いて胸部に取り付ける。

### 【使用方法等】

#### 使用方法

1. 電極を貼る部分を剪毛後、患者皮膚を清拭し乾燥させる。
2. リード線のバナナプラグを、バナナプラグ接続部に装着する。
3. 患者の胸部の正しい位置に電極を貼り、バナナプラグの数字並びにアルファベットに注意して、該当する電極の位置に合わせて接続する。  
スナップ電極については、本品底面の凹みに電極の突起をはめ、タブ電極については本品のクリップ部分ではさむ。
4. 心電図の計測が終了したら、アダプタを電極から取り外す。

### \*\*組み合せて使用可能な医療機器

一般的名称	販売名	承認/認証/ 届出番号
再使用可能な 心電用電極	ECG リューザブル電極 (GE)	13B1X001 50CS0070
単回使用電極	ディスプレイザブル電極 (GE)	13B1X001 50CS0069

### 【使用上の注意】

#### 重要な基本的注意

- ・本製品を液体に触れさせないこと。
- [クリップが錆びるなどの損傷のおそれがあるため]

#### 相互作用

##### 併用禁忌(併用しないこと)

医療機器 の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
MRI 装置	磁気共鳴画像診断装置(MRI)環境下では使用しないこと	誘導起電力による局所的な発熱で被験者が火傷を負うおそれ

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 保管方法

周囲温度： -40～70℃  
相対湿度： 10～95%(結露なきこと)

#### 使用期間

1 年[設計元データによる]  
但し、これは推奨された環境で使用された場合で、使用状況により差異が生じることがある。

### 【保守・点検に係る事項】

#### 使用者による保守点検事項

1. 目視による点検
  - (1) 外観の確認
    - ・製品の外観に異常がないことを確認すること。
    - ・損傷や摩耗がないこと。
  - (2) 清浄性の確認
    - ・清浄な状態であることを確認すること。
    - \*・本品の洗浄/消毒および洗浄/消毒剤については取扱説明書に従うこと。
    - \*・洗浄後は完全に乾燥するまで使用しないこと。
2. 機能の確認
  - ・正常状態・正常動作を確認すること。
3. 安全機能の確認
  - ・全てのケーブルやコネクタが安全にセットされているか確認すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

住所： 〒191-8503 東京都日野市旭が丘 4-7-127

お問い合わせ先： 消耗品受注センター  
電話： 0120-187-855  
FAX： 042-582-6923

製造業者： シェンチェン ラウンチ エレクトリカル  
コリミティッド  
(Shenzhen Launch Electrical Co., Ltd.)

国名： 中華人民共和国