

MAVIG X線防護板

【形状・構造及び原理等】

*形状



構造・構成ユニット

1. 構成

X線防護板本体のみで構成される。

*2. 本体寸法(幅 x 高さ)

寸法(cm): 60 x 76

作動・動作原理

本製品はX線を透過しにくい材質から作られており、天井に取り付けて使用することで、X線診断装置による撮影を行う際、患者から放出される放射線による不必要な被ばくから術者等を保護することが出来る。

【使用目的又は効果】

X線診断装置による撮影を行う際、患者から放出される放射線による不必要な被ばくから術者等を保護するために、天井に取り付けて使用する放射線防護用具である。

【使用方法等】

設置方法

本製品はX線診断装置の天井に取り付けて使用する。
診断装置、及び関連機器と干渉のない位置に取付けること。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

X線診断装置、及び関連機器との衝突に十分に注意を払うこと。
また、落下等を未然に防ぐため使用前の点検を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

耐用期間

10年[自己認証(当社データ)による]
(但し、指定された使用環境において標準的な頻度で使用され、指定の保守点検と定期交換部品・消耗品の交換をした場合の年数であり、使用状況によっては異なる場合がある)

*【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

- 目視による点検
 - 外観の確認
製品の外観に異常がないことを確認すること。
 - 清浄性の確認
清浄な状態であることを確認すること。
 - 製品周辺の確認
製品の妨げになる物が無いこと。
- 機能の確認
 - 可動部の動作
 - 製品の固定状態の確認
製品の固定を確認すること。

使用者による保守点検の詳細については取扱説明書を参照すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

住所: 〒191-8503 東京都日野市旭が丘 4-7-127

*保守サービス連絡先: カスタマーコールセンター
電話: 0120-055-919

製造業者: マービック ゲーエムベーハー
(MAVIG GmbH)

国名: ドイツ連邦共和国

社内部品番号: 5762477

取扱説明書を必ずご参照ください。