

## 特定保守管理医療機器

## アドバンテージ CRS2

(類型「セントリシティ CA1000」ソフトウェア)

## 【形状・構造及び原理等】

## 構造・構成ユニット

本装置は以下のユニットにより構成される。

- ・ 類型「セントリシティ CA1000」ソフトウェア式

詳細については、付属の取扱説明書を参照すること。

## 作動・動作原理

デジタルラジオグラフィ等の画像出力装置からネットワークを経由して転送される画像データを受信し、コンピュータ内のメモリに取り込む。

更にコンピュータで画像データの保管が可能な場合は、取り込んだ画像データをコンピュータ内の磁気ディスク上に記録、保存する。オペレーターは画像データを随時モニタ上に呼び出すことができる。

また、メモリ、又は磁気ディスク上の画像データに対して心機能解析等、各種の画像解析を施すことができる。

## 【使用目的又は効果】

## 使用目的

画像データを出力できる画像診断装置、及び画像管理装置とネットワークで接続し、画像データの処理(受信、表示、画像解析)、管理(外部接続記録装置への記録、保管、又は検索)、及び転送を行う。

## 【使用方法等】

本製品は推奨仕様を満たす汎用コンピュータ、又は医療機器に製造販売業者が指定した方法でインストールして使用する。

## 使用方法

1. 装置の電源投入及び起動  
停止中の装置を作動可能な状態にまで起動する操作である。装置を起動するには、外部データ保管装置、及び全ての装置の電源スイッチを押す。  
電源投入後、ログイン操作を行うことにより使用可能状態となる。
2. 画像の選択及び呼び出し  
画像データの中から、診断対象とする画像を選び、モニタ画面上に表示する操作である。  
モニタに表示されている画像データ一覧から、表示を希望する画像をマウスでクリックすることにより、画像が呼び出される。
3. 画像表示  
より効果的に読影・診断を行うため、ブライトネス・コントラスト調整、各種画像処理を行う操作である。モニタに表示される所望の処理事項を選ぶことにより、画像処理を実行し、診断を行う。
4. シャットダウン  
画像転送。記憶等の実行中の処理を正常に終了させ、装置の電源を落とすための操作である。  
モニタ上で“Shutdown”を選択する。シャットダウン動作が終了した後、コンピュータ、及びモニタ、全ての周辺装置の電源スイッチを切る。

## 【使用上の注意】

## 重要な基本的注意

- ・ 推奨仕様を満たす汎用コンピュータにインストールすること。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

住所： 〒191-8503 東京都日野市旭が丘 4-7-127

保守サービス連絡先： カスタマーコールセンター  
電話： 0120-055-919製造業者： ジーイー ヘルスケア  
(GE Healthcare)

国名： アメリカ合衆国

社内部品番号： 5799233

取扱説明書を必ずご参照ください。