

【禁忌・禁止】

適用対象（患者）

次の被検者、部位には使用しないこと。

・眼球への適用

[眼球への適用を意図して設計しておらず、過大な超音波出力により、白内障、眼構造の損傷等、患者に重篤な健康被害を及ぼすおそれがあるため]

【形状・構造及び原理等】

形状



装置の外観

構造・構成ユニット

1. 構成

本装置の構成を以下に示す。なお、構成部品は単体又は組み合わせて輸入・販売することがある。

(1) 本体

- 1) 装置本体
- 2) 観察用モニター
- 3) 操作キーボード
- 4) プローブホルダ
- 5) プローブ接続部
- 6) 外部出力機器接続部（背面）
- 7) リムーバブルドライブ接続部

(2) オプション機器

- 1) プローブ（本認証には含まない）
- 2) 生体信号処理部
- 3) 位置センサ（送信機）
- 4) 位置センサ（受信機）
- 5) 位置センサ（本体）
- 6) フットスイッチ
- 7) V Nav パーチャルトラッカーセンサー
- 8) V Nav ポール

2. 電氣的定格

定格電源電圧：AC100V
定格電源周波数：50/60Hz
電源入力：10A

3. 電撃に対する保護の形式と程度

保護の形式：クラスⅠ機器

保護の程度：

BF 形装着部：プローブ

CF 形装着部：生体処理信号部

4. 各部の寸法（±10%）

585mm（幅）1130～1410mm（高さ）830mm（奥行き）


5. 使用環境条件（標準環境）

周囲温度：10～35℃

相対湿度：30～85%（結露なきこと）

作動・動作原理

本体にプローブが接続もしくは選択された時、プローブ内からプローブコード信号がマスターコントローラ回路に送られる。マスターコントローラ回路がそのプローブを認識した後、ビームフォーミング回路はマスターコントローラ回路からの指示で、そのプローブの超音波周波数を選択する。送信パルス電圧を生成し、プローブ内の振動子（圧電素子）に印加、駆動させる。この原理でプローブから超音波が発信される。そして、プローブで受信された反射エコー信号をビームフォーミング回路で整合加算し、超音波受信ビームを形成、B/M モード、カラーフロー（CF）モード、ドプラ信号回路にて処理されてデジタルスキャンコンバータに送られる。そしてこれを走査（スキャン）させることで画像を得る。超音波周波数は、プローブの仕様により選択される。

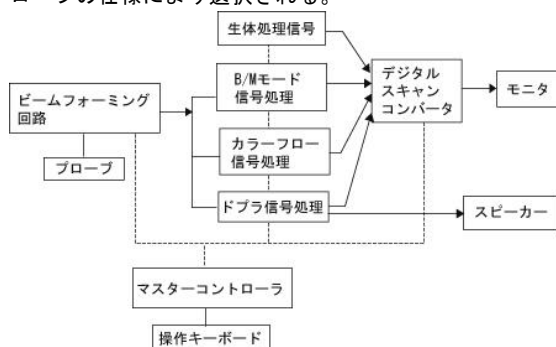

本装置は、以下に列挙する画像表示モードについて、単独、及びその組み合わせ表示ができる。

- ・B モード
- ・M モード
- ・ドプラ(D)モード
- ・カラーフロー(CF)モード

本装置のスキャン(走査)方式は、以下の3種類である。

- ・リニア
- ・コンベックス
- ・セクタ

* 【使用目的又は効果】

超音波を用いて体内の形状、性状又は動態を可視化し、画像情報を診断のために提供する装置である。また、超音波を用いて肝臓、脾臓、膵臓、乳腺、甲状腺又は前立腺の硬さに関する情報を提供するオプション機能を有する。

使用目的又は効果に関する使用上の注意

本製品は心臓への直接適用を意図していない。[マイクロショックの恐れがあるため]

【使用方法等】

設置方法

電磁波の影響から本装置を保護するために、有用な事前措置として、モーター、トランス、エレベーターなどの強い電磁放射の発生源から4.5m以上離して設置する。

使用方法

1. 使用直前の操作

- (1) プローブを接続し、患者名、ID などを入力する。
- (2) プローブを選択する。
- (3) プローブの超音波受信面に超音波ゲルを十分塗布する。

2. 使用中の操作

- (1) プローブを生体に当てて、スキャンを開始する。
- (2) 必要な動作モードを選択して、画質が最適になるように操作パネルから調整する。(ゲイン、ダイナミックレンジ、TGC など)
- (3) 得られた超音波イメージを用いて診断する。(必要に応じて、各種計測/演算機能を用い、診断の補助的情報を得る)
- (4) 必要な超音波イメージを保存・記録する。
- (5) 記録機器の制御は、記録機器上のキー、装置本体の操作パネルなどから行う。
- (6) 使用後の処置・保管・管理方法
- (7) プローブに付着している超音波ゲルを十分に拭き取る。

使用前点検、使用準備、使用中の操作、及び使用後の処置の詳細については、超音波画像診断装置の取扱説明書を参照すること。

組み合わせて使用する医療機器

本装置には以下のプローブを接続することができる。ただし、接続可能なプローブは本体類型、及びソフトウェアバージョンで異なるため、取扱説明書を参照すること。装置本体の構成によっては、プローブコネクタ形状により、3CRF プローブ/6Tc プローブは接続できない場合がある。

*エラストグラフィ対応プローブは下記のとおり。

*Strain：ストレインエラストグラフィ法

*SWE：シアウェーブエラストグラフィ法

販売名（類型）	承認番号 / 認証番号	*エラストグラフィ	
		*Strain	*SWE
IC5-9H プローブ (IC5-9-D)	21600BZZ00580000	*対応 2)	
9L プローブ (9L-D)	218ABBZX00058000	*対応 1)	*対応
11L-D プローブ (11L)	219ABBZX00084000		
C1-5-D プローブ	220ABBZX00205000	*対応 1)	
ML6-15-D プローブ	220ABBZX00204000	*対応 2)	
M6C プローブ	218ABBZX00160000		
3CRF プローブ (3CRF-D)	219ABBZX00016000		
RNA5-9 プローブ (RNA5-9-D)	21600BZY00703000		
RAB2-5L プローブ (RAB2-5-D)	21500BZY00529000		
RIC5-9-D プローブ	218ABBZX00157000		
RSP6-16 プローブ (RSP6-16-D)	21700BZY00472000		
S1-5 プローブ (S1-5-D)	221ABBZX00064000		
6S プローブ (6S-D)	220ABBZX00024000		
M5S-D プローブ	220ABBZX00309000		
6Tc プローブ	220ABBZX00191000		
L8-18i-D プローブ	222ABBZX00057000		
S4-10 プローブ (S4-10-D)	222ABBZX00056000		
C2-9-D プローブ (C2-9VN-D)	224ABBZX00142000	*対応 1)	
RAB6-D プローブ	223ABBZX00096000		
C1-6-D プローブ (C1-6VN-D)	224ABBZX00168000	*対応 1)	*対応

C3-10-D プローブ	226ABBZX00112000		
L3-9i-D プローブ	226ABBZX00146000		
C2-7-D プローブ (C-2-7VN-D)	226ABBZX00143000		

*なお、ストレインエラストグラフィでの対応 1)、対応 2) の内容については以下のとおり

対応 1)：肝臓の硬さに関する情報を提供（認証基準に基づき精度が確保されている）

対応 2)：組織の硬さに関する情報を提供（付帯機能に基づく）

販売名（類型）	承認番号／認証番号	製造販売業者
C2-6b プローブ (C2-6b-D)	226ABBZX00108000	コニカミノルタ（株）

本装置には以下の ECG ケーブルを接続することができる。

販売名	承認番号等
成人用 ECG ケーブル (IV)	13B1X00150US0007

販売名	承認番号等	製造販売業者
BD マルチリンク ECG ケーブル	07B1X00003100008	日本ベクトン・ディッキンソン（株）
BD マルチリンク ECG リード	07B1X00003100007	日本ベクトン・ディッキンソン（株）

本装置には以下のニードルシステム/ブラケットを接続することができる。使用方法・注意事項については、接続機器の取扱説明書、または添付文書を必ず事前に確認してください。

販売名	承認番号等	製造販売業者
シブコ VirtuTRAX ブラケット	13B1X00089040224	センチュリーメディカル株式会社
シブコ omniTRAX ブラケット	13B1X00089040226	

使用方法等に関連する使用上の注意

1. 超音波出力について

次の注意事項に従い、超音波の熱的、機械的作用をよく理解したうえで使用すること。
超音波出力は、診断可能な範囲で、できる限り低レベルに設定すること。また、検査時間を短くする等の配慮をすること。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. この装置は防爆型ではないので、装置の近くで可燃性、及び爆発性の気体を使用しないこと。
2. 指定された機器以外の装置を接続した場合、所定の EMC 性能(電磁両立性)を発揮できない恐れがあるので指定機器以外は接続しないこと
3. 本装置の傍で携帯電話など電磁波を発生する機器の使用は、装置に障害を及ぼす恐れがあるので使用しないこと。
4. 本装置に接続されるプローブと穿刺ニードルガイド、及び電気手術器を併用する場合には、使用前に必ずニードルカニューレ装着面に破損等が無く、スムーズに稼動することを確認のうえ、慎重に操作すること。
5. モニタとモニターアームの接続部には、隙間があるため、モニタやモニターアームを動かす際、指や手、物を置かないよう、また、挟まないように注意すること。
6. 不慮の事故による患者データなどのデータ消失を最小限にするため、外部記憶媒体へのバックアップを定期的に行うこと。

*7. エラストグラフィ機能

臓器の硬さに関する情報の表示を弾性率 (kPa) に変換して表示する場合、表示値は実際の臓器の硬さとは必ずしも一致しないことに留意すること。

取扱説明書を必ずご参照ください。

妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用

妊婦、妊娠の疑いのある者及び小児へ使用する場合は医師の指示のもとで慎重に行うこと。

超音波出力について、胎児に対する高出力、長時間の使用、特に妊娠初期の胎児への使用は、慎重に適用すること。

*シアウェーブエラストグラフィ法は、胎児への適用を意図していない。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

保管環境条件

	保管時／輸送時
温度	-10～50℃
湿度	30～80%（結露なきこと）

耐用期間

7年〔自己認証（製造元データ）による〕

但し、これは推奨された使用環境において標準的な頻度で使用され、指定の保守点検と定期交換部品・消耗品の交換をした場合の年数であり、使用状況によっては異なる場合がある。

装置構成部品の一部には一般市販部品も含まれており、部品のモデルチェンジ等により本装置の耐用期間内であってもサービスパーツが供給できなくなる場合もある。

（例えば情報関連機器類など）

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

1. 目視による点検

(1) 外観の確認

装置の外観に異常がないことを確認すること。

オプション機器、及び付属品等に、損傷や摩耗がないこと。

(2) 清浄性の確認

清浄な状態であることを確認すること。

(3) オプション機器、及び付属品の洗浄・消毒方法は、製品ごとに異なる場合があるため、取扱説明書等の指示に従って行うこと。

2. 機能の確認

(1) 装置の正常状態の確認 装置が正常状態・正常動作を確認すること。

1) システムの起動

2) 異音、異臭がないことを確認すること。

詳細は、取扱説明書を参照すること。

業者による保守点検事項

1. 定期点検を弊社、又は弊社の指定する業者に依頼すること。

2. 点検頻度：年1回

詳細は、サービスマニュアルを参照すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

住所：東京都日野市旭が丘 4-7-127

保守サービス連絡先：カスタマーコールセンター

電話：0120-055-919

製造業者名：ジーイーメディカルシステムズウルトラサウンドアンドプライマリーケアダイアグノスティクスエルシー

GE Medical Systems Ultrasound and Primary Care Diagnostics, LLC

国名：アメリカ合衆国

取扱説明書を必ずご参照ください。