

特定保守管理医療機器

ML6-15-D プローブ

再使用禁止

(オプション ML6-15-D プローブ用水袋キット)

【禁忌・禁止】

本製品のカバーはディスプレイ製品のため、再使用は行わないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状



構造・構成ユニット

- 構成
本製品の構成を以下に示す。
 - ブラケット
 - インサート
 - カバー
- 本体の寸法(幅 x 高さ x 奥行)
寸法(mm): 39.7 x 86.5 x 29.3

【使用目的又は効果】

使用目的

超音波を用いて体内の形状、性状、又は動態を可視化し、画像情報を診断のために提供する装置に使用するプローブに装着可能なオプション品で、超音波断層像観察下で浅部組織の診断において体表接触性を向上させる。

【使用方法等】

使用方法

- インサートをカバーに入れる。
- カバーに水を入れる。
- カバー端を空気を抜きながら縛る。
- カバーをブラケットに入れる。
- ブラケットの扉を閉じる。
- ブラケットをプローブに取り付ける。

組み合わせて使用する医療機器

本製品は以下の体表用の超音波診断用プローブ(類型を含む)に装着して使用可能である。

販売名	承認番号等
ML6-15-D プローブ	220ABBZX00204000

【使用上の注意】

使用注意(次の患者には慎重に適用すること)

本製品のカバーは天然ゴムを使用している。天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショック等のアレルギー性症状をまれに起こすことがあるため天然ゴムに対する過敏症のある患者には使用しないこと。また、使用中にこのような症状を起こした場合には直ちに使用を中止し適切な措置を施すこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- 洗浄・消毒後はブラケット、及びインサートを専用ケースに保管すること。
- 保管、運搬は通常使用される環境の常温・常湿の範囲内で適切に行うこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

住所: 〒191-8503 東京都日野市旭が丘 4-7-127

保守サービス連絡先: カスタマーコールセンター
電話: 0120-055-919

製造業者: GEヘルスケア・ジャパン株式会社

社内部品番号: 5774596

取扱説明書を必ずご参照ください。