

機械器具 12 理学診療用器具

管理医療機器 手持型体外式超音波診断用プローブ JMDN 40768000

特定保守管理医療機器

「ML6-15-D プローブ」のオプション

ML6-15-D プローブ用水袋キット S

【形状・構造及び原理等】

形状



製品の外観

構造・構成ユニット

1. 構成

本製品は、以下のユニットにより構成される。

- (1) 水袋本体
- (2) 付属品類
 - ・ 交換用針刺ゴム弁
2. 本体の寸法(幅 x 高さ x 奥行)
寸法(mm) : 86.23x30.70x36.44

詳細については取扱説明書を参照すること。

【使用目的又は効果】

超音波を用いて体内の形状、性状、又は動態を可視化し、画像情報を診断のために提供する装置に使用するプローブに装着可能なオプション品で、超音波断層像観察下で浅部組織の診断において体表接触性を向上させる。

【使用方法等】

使用方法

1. 水袋に脱気水を注水する
2. プローブに装着する

使用方法の詳細については、本製品の取扱説明書を参照すること。

組み合わせて使用する医療機器

本製品は以下の超音波診断用プローブ(類型を含む)に装着して使用する。

販売名称	承認番号等
ML6-15-D プローブ	220ABBZX00204000

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 水袋の使用前後には水袋に異常のないことを必ず点検すること。
2. 使用に際しては感染防止のための保護手袋を着用すること。
3. 使用前には、感染防止のため洗浄、必要に応じて消毒、滅菌を行うこと。

詳細については本製品の取扱説明書を参照すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

1. 洗浄・消毒後は適切に保管すること。
2. 保管、運搬は通常使用される環境の常温・常湿の範囲内で適切に行うこと。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

洗浄・消毒・滅菌については、本製品の取扱説明書を参照すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

住所：〒191-8503 東京都日野市旭が丘 4-7-127

保守サービス連絡先： カスタマーコールセンター
住所：〒192-0033 東京都八王子市高倉町 67-4
電話： 0120-055-919
FAX： 042-648-2905

製造業者： GEヘルスケア・ジャパン株式会社

社内部品番号： 5723184

取扱説明書を必ずご参照ください。