

## 機械器具 21 内臓機能検査用器具

管理医療機器 汎用心電計 JMDN 11407010

(一般医療機器 心電計ケーブル及びリード JMDN 35562010)

## 特定保守管理医療機器

## 心電計(解析機能付) MAC2000

(ECG コネクタ)

## 【形状・構造及び原理等】

## 形状



製品の外観

## 構造・構成ユニット

1. 本製品は電極接続部、リード線接続部からなる ECG 測定用コネクタである。
2. 使用環境条件(標準環境)  
周囲温度: 10~40℃  
相対湿度: 30~85%

## 作動・動作原理

本製品は心電計等の ECG 測定用コネクタである。  
ECG リードワイヤー、ECG 電極、ECG コネクタを用い、  
心電図を計測し不整脈、虚血性心疾患、心室肥大の診断  
の補助に使用する心電図を計測するために、患者の心電  
図信号を導出する。

## 【使用目的又は効果】

## 使用目的

被検者の心電図信号を心電計(ECG)に伝達する装置をいう。本製品は、あるパターンに従って電極を用いて四肢、及び胸部に取り付ける。

## 【使用方法等】

## 使用方法

1. ECG コネクタのリード線接続部をリードワイヤーの接続口に合わせて確実に差し込むこと。
2. ECG コネクタの電極接続部に電極を装着する。  
プラグの色に注意し、該当する電極の位置に合わせて装着すること。

## 【使用上の注意】

## 重要な基本的注意

- ・ 当社指定以外の装置と組み合わせて使用しないこと。

## 【保管方法及び有効期間等】

## 保管方法

周囲温度: -10~60℃  
相対湿度: 10~95%(結露なきこと)

## 使用期間

1 年[自己認証(当社データによる)]  
但し、これは推奨された環境で使用された場合で、使用状況により差異が生じることがある。

## 【保守・点検に係る事項】

## 使用者による保守点検事項

1. 目視による点検
  - (1) 外観の確認  
製品の外観に異常がないことを確認すること。
    - ・ 損傷や摩耗がないこと。
  - (2) 清浄性の確認  
清浄な状態であることを確認すること。
    - ・ 本製品使用後は酒精綿で清拭して保管すること。  
滅菌する場合は、オートクレーブ滅菌を避け、EOG 滅菌にて滅菌処理すること。
  - (3) 機能の確認
    - ・ 製品の正常状態の確認  
正常状態・正常動作を確認すること。
    - ・ 異音、異臭がないことを確認すること。
  - (4) 安全機能の確認  
全てのケーブルやコネクタが安全にセットされているか確認すること。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

住所: 〒191-8503 東京都日野市旭が丘 4-7-127

お問い合わせ先: 消耗品受注センター  
電話: 0120-187-855  
FAX: 042-582-6923

製造業者: ジーイー メディカルシステムズ チャイナ  
コ リミテッド  
(GE Medical Systems (China) Co., Ltd.)  
国名: 中華人民共和国

社内部品番号: 5813121

取扱説明書を必ずご参照ください。