

GE 麻酔回路セット

※再使用禁止

(リユーザブル患者回路、リユーザブル患者回路キット)

【警告】


1. 使用前は必ずリークテストを実行し、洗浄手順に従って洗浄を行うこと。
2. コンポーネントをチェックして閉塞がなく、空気が自由に通過できることを確認すること。
3. チューブを定期的に点検し、水が溜まったらチューブを空にすること。
4. ガスサンプリングチューブ及び排気ラインは単回使用製品のため再使用しないこと

※ガスサンプリングチューブ及び排気ライン以外の構成品は再使用可能。

*【形状・構造及び原理等】

*形状

2096534-001 ハイトレル患者回路 (成人用) 0.35m

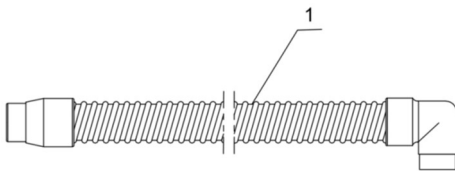


| | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | ハイトレル患者回路 (成人用) 0.35m 22mmF コネクタ |
|---|-------------------------------------|

2096534-002 ハイトレル患者回路 (成人用) 0.75m

2096534-003 ハイトレル患者回路 (成人用) 0.9m


2096534-004 ハイトレル患者回路 (成人用) 1.5m

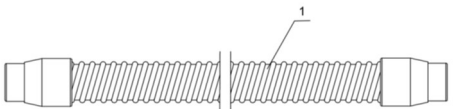

| | |
|---|-------------------------------------------------|
| 1 | ハイトレル患者回路 (成人用) 0.75m, 0.9m, 1.5m 22mmF コネクタ |
|---|-------------------------------------------------|


2096534-101 シリコン患者回路 (成人用) 1.0m

2096534-102 シリコン患者回路 (成人用) 1.5m

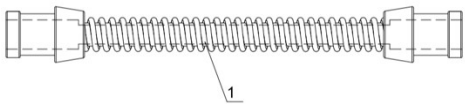


| | |
|---|-----------------------------------------|
| 1 | シリコン患者回路 (成人用) 1.0m, 1.5m 22mmF コネクタ |
|---|-----------------------------------------|

2096534-103 シリコン患者回路 (小児用) 1.5m

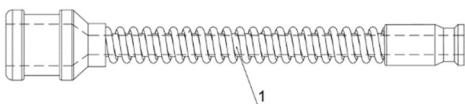


| | |
|---|------------------------------------------|
| 1 | シリコン患者回路 (新生児用) 1.5m 22mmF/10mmF コネクタ |
|---|------------------------------------------|

2096534-005 患者回路キット (成人用) ウォータートラップ付きハイトレルチューブ

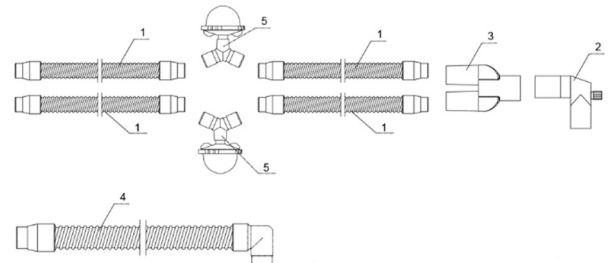

| | |
|---|---------------------------------------------------|
| 1 | ハイトレル患者回路 (成人用) 0.75m 22mmF コネクタ付き |
| 2 | ガスサンプリングポート付きスウィーベルコネクタ 22mmM/15mmF、15mmM コネクタ |
| 3 | Yピースコネクタ (成人用) 15mmF/22mmM、22mmM コネクタ (患者回路側) |
| 4 | ハイトレル患者回路(成人用)エルボコネクタ付き 0.35m 22mmF コネクタ |
| 5 | ウォータートラップ 22mmM コネクタ |


2096534-006 患者回路キット (小児用) ウォータートラップ付きハイトレルチューブ

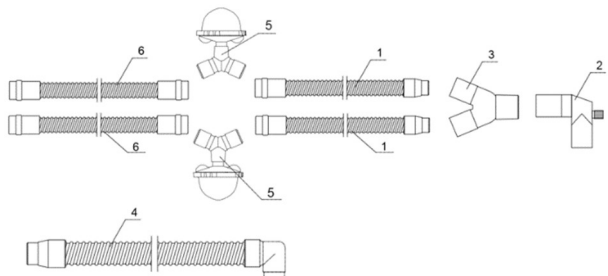

| | |
|---|---------------------------------------------------|
| 1 | ハイトレル患者回路 (小児用) 0.75m 15mmF、22mmF コネクタ |
| 2 | ガスサンプリングポート付きスウィーベルコネクタ 22mmM/15mmF、15mmM コネクタ |
| 3 | Yピースコネクタ(小児用) 22mmM/15mmF、15mmM コネクタ |
| 4 | ハイトレル患者回路(成人用)エルボコネクタ付き 0.35m 22mmF コネクタ |
| 5 | ウォータートラップ 22mmM コネクタ |
| 6 | ハイトレル患者回路 (小児用) 0.75m 22mmF コネクタ |


取扱説明書を必ずご参照ください。

2096534-007 患者回路キット（成人用）1.5m ハイトレルチューブ

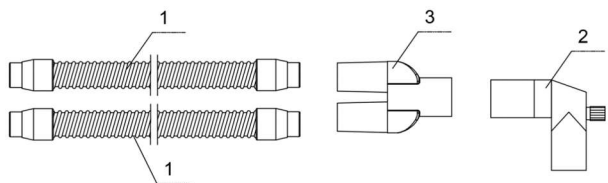


| | |
|---|---------------------------------------------------|
| 1 | ハイトレル患者回路（成人用）1.5m 22mmF コネクタ |
| 2 | ガスサンプリングポート付きスウィーベルコネクタ 22mmM/15mmF、15mmM コネクタ |
| 3 | Yピースコネクタ(成人用) 15mmF/22mmM コネクタ、22mmM コネクタ |

2096534-008 患者回路キット（小児用）1.5m ハイトレルチューブ

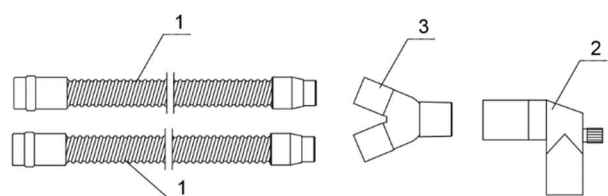

| | |
|---|---------------------------------------------------|
| 1 | ハイトレル患者回路（小児用）1.5m 15mmF/22mmF コネクタ |
| 2 | ガスサンプリングポート付きスウィーベルコネクタ 22mmM/15mmF、15mmM コネクタ |
| 3 | Yピースコネクタ(小児用) 22mmM/15mmF コネクタ、15mmM コネクタ |

20965364-009 スタートアップキット（成人用）1.5m ハイトレルチューブ

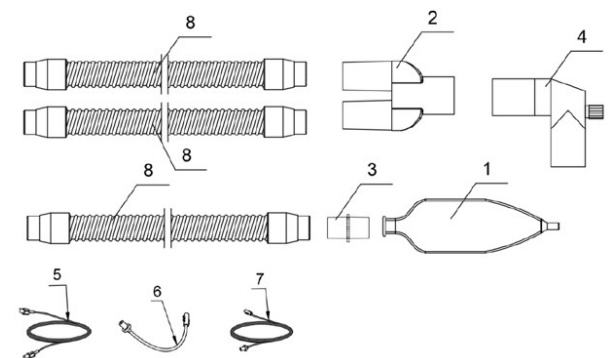

| | |
|---|---------------------------------------------------|
| 1 | 2L 呼吸バッグ 22mmF コネクタ |
| 2 | Yピースコネクタ（成人用） 15mmF/22mmM、22mmM コネクタ |
| 3 | ストレートコネクタ 22mmM/15mmF コネクタ |
| 4 | ガスサンプリングポート付きスウィーベルコネクタ 22mmM/15mmF、15mmM コネクタ |
| 5 | ガスサンプリングチューブ（単回使用）3m |
| 6 | 排気ライン（単回使用）18cm |
| 7 | 排気ライン（単回使用）1.0m |
| 8 | ハイトレル患者回路（成人用）1.5m 22mmF コネクタ |

*定格流量

成人用：毎分 30L<0.06cmH₂O

小児用：毎分 15L<0.12cmH₂O

材質

ガスサンプリングチューブ、排気ライン：ポリ塩化ビニル

[可塑剤にフタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)を使用]

本品は天然ゴムラテックスを使用していません。

未滅菌

【使用目的又は効果】

麻酔器等に接続し、麻酔中の呼吸管理に用いること。

*【使用方法等】

*使用方法

1. すべての接続部及びコネクタがしっかり接続され、緩んでいないことを確認する。
2. ウォータートラップが回路の最も低い位置にくるよう呼吸回路を患者に接続する。
3. 回路内に詰まりがないことを確認するため、酸素を流し、ガスが流れていることを確認する。
4. リークテストを行い、漏れがないことを確認する。

洗浄・滅菌手順

オートクレーブ前に必ず有機材料および残留化学品または消毒薬を除去する。オートクレーブで最高 134°C、最大 20 分間滅菌処理（推奨）を行う。この滅菌処理は患者間または必要に応じてより頻繁に行うこと。ガスサンプリングチューブ及び排気ラインには適用しない事。

*組み合わせて使用する医療機器

本品は以下麻酔器、他設計元が検証して認めた機器と接続可能である。

| 販売名 | 承認番号 |
|----------------------|------------------|
| エスティバ 7900 | 21000BZY00595000 |
| エスティバ 7100 | 21300BZY00563000 |
| エスティバ/5 インダクション | 21300BZY00564000 |
| エスティバ/5 MRI | 21300BZY00676000 |
| エスティバ コンパクト | 21400BZY00132000 |
| エスパイア | 21500BZY00187000 |
| アバンス ケアステーション | 21600BZY00044000 |
| エイシス | 21900BZX00741000 |
| エスパイア 7900 | 22000BZX00790000 |
| エスパイア View | 22200BZX00912000 |
| アバンス CS2 | 22500BZX00349000 |
| Carestation 600 シリーズ | 22700BZX00422000 |
| 9100c NXT シリーズ | 23000BZX00333000 |
| Carestation 750 シリーズ | 30200BZX00223000 |

取扱説明書を必ずご参照ください。

本品は以下呼吸回路フィルタ、他設計元が検証して認めた機器と接続可能である。

| 販売名 | 認証番号 |
|-------------------|------------------|
| GE 単回使用人工鼻フィルタ | 303ADBZX00045000 |
| GE バクテリア・ウィルスフィルタ | 303ADBZX00039000 |

本品は以下呼吸回路バッグ、他設計元が検証して認めた機器と接続可能である。

| 販売名 | 認証番号 |
|---------------|------------------|
| GE 麻酔用呼吸回路バッグ | 302ADBZX00030000 |

本品は以下麻酔用マスク、他設計元が検証して認めた機器と接続可能である。

| 販売名 | 認証番号 |
|---------------|------------------|
| GE 麻酔用フェイスマスク | 302ADBZX00040000 |

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

住所：〒191-8503 東京都日野市旭が丘 4-7-127

連絡先：

アクセサリ&サプライ受注センター 電話：0120-187-855

【製造業者】

ビンセントメディカル（ドン Guan）マニュファクチャ

リングコリミティッド

(Vincent Medical(DongGuan)Manufacturing Co., Ltd.)

国名：中華人民共和国

社内部品番号：5918339

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 本製品の使用前に、接続に誤りがなく、すべての接続部に漏れがないことを確認すること。
2. すべての接続部は両手で持って強く押し込む、又はねじって固定し、緩みがないことを確認すること。
3. 本製品に損傷、劣化、又は異常がある場合には使用しないこと。
4. 構成品のガスサンプリングチューブ、排気ラインについては単回使用品のため、再使用しないこと。
5. 本製品に人工鼻を接続して使用する場合には、加温加湿器と併用しないこと。[人工鼻のフィルタが閉塞し、換気が困難となる可能性があるため]
6. ウォータートラップはリークがないように確実に装着すること。
7. 使用前にウォータートラップの誤接続によるガスリークについて注意を喚起する「注意ラベル」をウォータートラップのどこからでも見える位置に貼付すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

保管場所については次の事項に注意すること。

1. 清潔で涼しく乾燥した場所に保管すること。
2. 劣化を防ぐため、紫外光への長期暴露は避けること。

有効期間

製造日より3年 [製造元データによる]

使用期間

本品の推奨使用期間は24時間未満である。

耐用期間

最大滅菌回数：20回 [製造元データによる]（ガスサンプリングチューブ及び排気ラインを除く）

但し、使用状況や取扱い方法によっては、20回未満で使用できなくなる場合がある。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

1. 本製品を使用する前に、損傷、劣化、異常等が無いか目視点検を行うこと。
2. 全ての接続が安全にセットされていることを確認すること。

取扱説明書を必ずご参照ください。