

GE 麻酔回路セット (ストレートコネクタ)

【警告】


1. 使用前は必ずリークテストを実行し、洗浄手順に従って洗浄を行うこと。
2. コンポーネントをチェックして閉塞がなく、空気が自由に通過できることを確認すること。
3. 本品の使用により死腔量が増えるため換気条件を再設定すること。

*【形状・構造及び原理等】

*形状

2096533-004 ストレートコネクタ (成人用)

以下の2つのタイプがある。

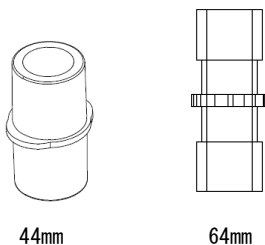

44mm

64mm

【使用目的又は効果】

麻酔器等に接続し、麻酔中の呼吸管理に用いること。

【使用方法等】

使用方法

1. 最初に使用する前と使用後は毎回、洗浄・消毒または滅菌を院内の方針、ガイドラインに従って行うこと。
2. 使用前に、ストレートコネクタに損傷がないか毎回確認する。損傷があれば廃棄して、取り替えること。
3. 呼吸バッグと患者回路にしっかりと取り付け、リークのない密着性を確保する。使用前には必ずリークテストを行うこと。
4. 麻酔器のモードを確認してから換気を行う。

洗浄手順

オートクレーブ前に必ず有機材料および残留化学品または消毒薬を除去する。

蒸気オートクレーブで最高 134°Cにて最大 20 分間滅菌処理を行う。この滅菌処理は患者間または必要に応じてより頻繁に行うこと。

【使用上の注意】

*重要な基本的注意

1. 本製品の使用前に、接続に誤りがなく、すべての接続部に漏れがないことを確認すること。
2. すべての接続部は両手で持って強く押し込む、又はねじって固定し、緩みがないことを確認すること。
3. 本製品に損傷、劣化、又は異常がある場合には使用しないこと。
4. 可燃性の麻酔剤を含む混合ガスは使用しないこと。

5. 使用後の本品は汚染されたものとみなし、院内の方針、現地のガイドラインおよび規則に従って取り扱うこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

保管場所については次の事項に注意すること。

- (1) 清潔で涼しく乾燥した場所に保管すること。
- (2) 劣化を防ぐため、直射日光を避け、蛍光灯もしくは紫外光への長期暴露は避けること。

有効期間

製造日より3年間

*使用期間

本品の推奨使用期間は24時間未満である。

*耐用期間

最大滅菌回数：20回 [製造元データによる]

但し、使用状況や取扱い方法によっては、20回未満で使用できなくなる場合がある。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

1. 本製品を使用する前に、損傷、劣化、異常等がないか目視点検を行うこと。
2. 全ての接続が安全にセットされていることを確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

住所：〒191-8503 東京都日野市旭が丘4-7-127

お問い合わせ先： 消耗品受注センター
電話： 0120-187-855

製造業者：

ビンセントメディカル(ドングアン)マ
ニュファクチャリングコリミティッド
(Vincent
Medical(DongGuan)Manufacturing Co.,
Ltd.)

国名： 中華人民共和国

社内部品番号： 5879009

取扱説明書を必ずご参照ください。

5879009