

GE 麻酔回路セット (バッグアームコネクタ)


【警告】

1. 使用前は必ずリークテストを実行し、洗浄手順に従って洗浄を行うこと。
2. コンポーネントをチェックして閉塞がなく、空気が自由に通過できることを確認すること。
3. 本品の使用により死腔量が増えるため換気条件を再設定すること。

【形状・構造及び原理等】

形状

2105488-005 バッグアームコネクタ

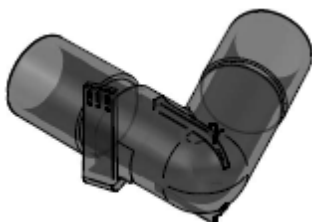

【使用目的又は効果】

麻酔器等に接続し、麻酔中の呼吸管理に用いること。

【使用方法等】

使用方法

1. 最初に使用する前と使用後は毎回、洗浄・消毒または滅菌を院内の方針、ガイドラインに従って行うこと。
2. 使用前に、バッグアームコネクタに損傷がないか毎回確認する。損傷があれば廃棄して、取り替えること。
3. 呼吸バッグと患者回路にしっかりと取り付け、リークのない密着性を確保する。使用前には必ずリークテストを行うこと。
4. 麻酔器のモードを確認してから換気を行う。

洗浄および消毒

洗剤溶液、または弱アルカリ性もしくは中性のクリーナーで洗浄すること。熱水選択（95℃）による消毒か、または一般的な器具用消毒液を、メーカーの指示に従って使用する科学的消毒方法で消毒する。

滅菌方法

121℃または 134℃で、オートクレーブのメーカーの指示に従って、オートクレーブにかける。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 医家向け医療機器であるため、医師による使用、及び医師の指示によって使用すること。
2. 本製品の使用前に、接続に誤りがなく、すべての接続部に漏れがないことを確認すること。
3. すべての接続部は両手で持って強く押し込む、又はねじって固定し、緩みがないことを確認すること。
4. 本製品に損傷、劣化、又は異常がある場合には使用しないこと。
5. 可燃性の麻酔剤を含む混合ガスは使用しないこと。

6. 使用後の本品は汚染されたものとみなし、院内の方針、現地のガイドラインおよび規則に従って取り扱うこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

保管場所については次の事項に注意すること。

- (1) 清潔で涼しく乾燥した場所に保管すること。
- (2) 劣化を防ぐため、直射日光を避け、蛍光灯もしくは紫外光への長期暴露は避けること。

有効期間

製造日より5年間（設計元データによる）

最大50回まで再使用可能（設計元データによる）

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

1. 本製品を使用する前に、損傷、劣化、異常等が無いか目視点検を行うこと。
2. 全ての接続が安全にセットされていることを確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

住所：〒191-8503 東京都日野市旭が丘4-7-127

お問い合わせ先： 消耗品受注センター
電話： 0120-187-855

製造業者： フレクシケアメディカルリミティッド
(Flexicare Medical Ltd.)

*国名： イギリス

社内部品番号：5876539

取扱説明書を必ずご参照ください。