

歯科材料(08) 歯科用石膏及び石膏製品  
一般医療機器 歯科用樹脂系模型材 JMDN34811000

## ジンジバルマスク・ソフト

### 【形状・構造及び原理等】(\*\*)

- ・形状、型式            オーダーナンバー
- セット・・・・・・・・・・ 540 S104 1
- カートリッジ 50ml・・・・ 540 S104 7

- ・硬化時間：約6～7分(常温時)\*
- ・原理：専用のディスペンサー(マルチシルドosingデバイス)に装着し、トリミングした支台歯の歯肉部の再現をするために使用する。\*

### 【使用目的又は効果】(\*\*)

- ・歯科用模型及び修復物の作製過程で用いる各種高分子からなる材料をいう。

### 【使用方法等】(\*\*)



作業模型を通常に従い作成する。



分割前の作業模型上で、再現する部位のコアを作成する。



通常に従い石膏用ノコで分割し支台歯のトリミングを行う  
ノコで分割したスペースをワックス等でブロックアウトし、ペーストが流れ込まないようにする。唇側から舌側にペーストが流入するスペースを十分に確保する。



シリコンコアにマトリックスドリル(別売:330 0078 0)を使ってペーストの注入穴と反対側に排出穴を開ける。  
シリコンコアの内面と、注入穴と排出穴に分離剤を塗布し、作業模型にスティッキーワックス等で固定をする。(分離剤は注入穴と排出穴の両方に必ず塗布すること)



ディスペンサーにカートリッジを取り付けキャップを外し、ミキシングチップを取り付ける。ディスペンサーのレバーを引きながらペーストを注入する。ミキシングチップを注入穴に入れて排出穴からペーストが出てくるまでゆっくりと注入する。  
作業は1分以内に行うこと。



注入し終わったら硬化まで6～7分常温で放置します。硬化後、注入穴と排出穴からの余剰ペーストをナイフでカットし、ゆっくりとシリコンコアを作業模型から外す。スチームクリーナー等でブロックアウトした模型上のワックスを除去し、ナイフ又はシリコンパーで注入穴と排出穴のジンジバルマスクを取り除く。

### 【使用上の注意】(\*\*)

- ・本製品は火気の近くで作業しないこと。また、十分な換気されている場所で使用すること。
- ・手袋を装着して使用し、皮膚に付着した場合流水で洗浄すること。
- ・本製品は目に入らないように注意すること。万一目に入った時には、すぐに流水で洗浄し、医師の診断を受けること。\*
- ・本製品の使用により、発疹、皮膚炎等のアレルギー性症状を起こした場合、使用を中止しすぐに、医師の診断を受けること
- ・本製品は他の製品と混用しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】(\*\*)

- ・保管は室温(28℃以下)で直射日光を避けること。
- ・使用期限は製造後2年以内で使用すること。
- ・本製品は歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管、管理すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】(\*\*)

製造販売業者  
株式会社日本歯科商社  
製造業者  
ブレーデント社(ドイツ)  
(英名)breident GmbH & Co. KG