

機械器具(65) 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用ワックス形成器 JMDN35794000

エルゴノムワックスナイフ

【形状・構造及び原理等】(**)

- ・形状、型式 オーダーナンバー
- 1 本入り 310 0001 3



- ・全長:16cm(*)
- ・重量:13g(*)
- ・先端部:ステンレス鋼(*)
- ・柄部:樹脂(*)
- ・原理:歯肉形態付与が容易にできる豊隆と先端の形状を有しワックスの盛上げと形成をするために使用する。(*)

【使用目的又は効果】(**)


- ・ワックスパターンを彫刻するために用いる歯科用器具をいう。通常、様々なサイズ及び形状の鈍な刃先をもち、ワックスパターン成形時にワックスを軟化させるために加熱することができる。(*)

【使用方法等】(**)

- ・ナイフ状に形成された側は歯頸部、歯間乳頭部の形成に使用する。



- ・スプーン状に形成された側は歯肉部のモデリング、形成に使用する。

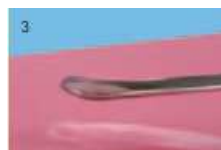

【使用上の注意】(**)

- ・先端部は切削、刻印等の二次加工をすることは、破折、サビ等の原因になるので行わないこと。
- ・本製品は縁端が鋭いため、使用中に手指などを傷つけないように注意すること。(*)

- ・本製品に熱を加えて使用する場合、火傷に注意すること。(*)
- ・本製品を使用した後は汚れを良く拭き取ること。(*)

【保管方法及び有効期間等】(**)

- ・水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。
- ・本製品は歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- ・ナイフ状に形成された先端部は変形する恐れがあるので保管時には先端部に負荷のかからないように保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】(**)

製造販売業者
株式会社日本歯科商社
製造業者
ブレーデント社(ドイツ)
(英名) bredent GmbH & Co. KG