

歯科材料(07) 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャストイングワックス JMDN16189000

GEO ワックスワイヤー

【形状・構造及び原理等】(*)

形状、型式	オーダーナンバー
ターコイズブルー硬質 2.0mm	676-2020
ターコイズブルー硬質 2.5mm	676-2025
ターコイズブルー硬質 3.0mm	676-2030
ターコイズブルー硬質 3.5mm	676-2035
ターコイズブルー硬質 4.0mm	676-2040
ターコイズブルー硬質 5.0mm	676-2050
ブルー中硬質 2.0mm	678-3020
ブルー中硬質 2.5mm	678-3025
ブルー中硬質 3.0mm	678-3030
ブルー中硬質 3.5mm	678-3035
ブルー中硬質 4.0mm	678-3040
ブルー中硬質 5.0mm	678-3050
ライトブルー超硬質 2.0mm	675-1020(**)
ライトブルー超硬質 2.5mm	675-1025(**)
ライトブルー超硬質 3.0mm	675-1030(**)
ライトブルー超硬質 3.5mm	675-1035(**)
ライトブルー超硬質 4.0mm	675-1040(**)
ライトブルー超硬質 5.0mm	675-1050(**)

- ・本製品を高温となる場所(ストーブの側、直射日光のあたる場所)に放置しないこと。
- ・使用及び保管場所には消火器を備えること。
- ・本製品は火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に多量に保管しないこと。
- ・本製品は歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】(*)

製造販売業者
株式会社日本歯科商社
製造業者
レンフェルト社(ドイツ)
(英名) RENFERT GmbH



- ・主成分:パラフィンワックス、カルナウパロウ、色素
- ・原理:ロール状になっているワックスでスプーリングを行うときに使用する。

【使用目的又は効果】(*)

- ・ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型製作用のキャストイングワックスをいう。

【使用方法等】(*)

- ・症例にあわせ長さを調節し、ワックスパターンと固定する。
- ・カービング・埋没は通法に従い作業する。

【使用上の注意】(*)

- ・本製品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。
- ・使用場所には消火器を備えること。
- ・他の製品と混用しないこと。
- ・本製品を使用する際には必ず換気をしながら使用すること。
- ・本製品が目に入らないように注意すること。万一目に入った時にはすぐに流水で洗浄し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】(*)

- ・室温保管