

## GEO ホワイトワックス

### 【形状・構造及び原理等】(\*\*)

- ・形状、型式  
オベーク・・・・・・・・・・・・・・・・・・499-0101



- トランスペアレント・・・・・・・・・・・・・・・・499-0201



- ・主成分：パラフィンワックス、カルナウバロウ、色素
- 物理的性能
- ・融解点：71℃～76℃
- ・原理：軟化させて補綴物のろう型を作製するために使用する。

### 【使用目的又は効果】(\*\*)

- ・ロストワックス法による固定式補綴物のろう型作製のキャストイングワックスをいう。

### 【使用方法等】(\*\*)

- ・模型材の表面にピコセップなどのワックス分離材を塗布する。
- ・ワックスインスツルメントなどを用いて、少量ずつ適温に溶かしたワックスを盛上げていく。
- ・カービング・埋没は通法に従い作業をする。
- ・マイクロクリスタルの校正を持つ低収縮性である。
- ・早い融解と早い硬化で操作性に優れている。
- ・高度表面張力、伸縮性の無い頑丈で良好な切削感がある。
- ・トランスペアレントは何度もフィルタリングされており金属や無機物をろ過しているので残留物を残すことなく焼却が可能である。
- ・オベークは溶解時でも不透明性がはっきりとわかる。
- ・可塑性を持ち、レリーフを強調できる効果を持つ。咬合面の形成に最適である。
- ・本製品は歯冠色に近い色である。

### 【使用上の注意】(\*\*)

- ・本製品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。
- ・本製品はろう型作製以外の用途に使用しないこと。
- ・使用場所には消火器を備えること。
- ・本製品が目に入らないように注意すること。万一目に入った時にはすぐに流水で洗浄し、医師の診断を受けること。(\*)

### 【保管方法及び有効期間等】(\*\*)

- ・室温保管
- ・本製品を、高温となる場所(ストーブの側、直射日光のあたる場所)に放置しないこと。
- ・使用及び保管場所には消火器を備えること。
- ・本製品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に多量に保管しない。
- ・本製品は歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】(\*\*)

製造販売業者  
株式会社日本歯科商社  
製造業者  
レンフェルト社(ドイツ)  
(英名)RENFERT GmbH