

歯科材料(09) 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

コヒノール L

【形状・構造及び原理等】(*)

- ・ 形状、型式 オーダーナンバー
5g 516-0001



- ・ 主成分：ダイヤモンド、セラミック
- ・ 原理：ダイヤモンドを含有したペーストでブラシ、パフ、フェルトホイール等に付け補綴物を研磨するため使用する。

【使用目的又は効果】(*)

- ・ 補綴物等の研磨に用いる器材をいう。別に名称を定めるものを除く。

【使用方法等】(*)

- ・ 本製品をブラシ、パフ、フェルトホイール等に付け、ハンドピースに装備、回転させ断続的に被切削物に押し付けて研磨する。

【使用上の注意】(*)

- ・ 本製品を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- ・ 目を保護するために保護めがね等を使用すること。
- ・ 他の製品と混用して使用しないこと。
- ・ 本製品を使用し、研磨した粉塵等が目に入らないように注意すること。万一目に入ったときは、すぐに流水で洗浄し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】(*)

- ・ 室温保管
- ・ 本製品を高温となる場所(ストーブの側、直射日光のあたる場所)に放置しないこと。
- ・ 本製品は歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】(*)

製造販売業者
株式会社日本歯科商社
製造業者
レンフェルト社(ドイツ)
(英名) RENFERT GmbH