

歯科材料(09) 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

ブリネル L

【形状・構造及び原理等】

- ・形状、型式 オーダーナンバー
5ml 519-0001



- ・主成分：ダイヤモンド、セラミック
- ・原理：ダイヤモンドを含有したペーストでバフ、フェルトホイール等に付け補綴物を研磨するために使用する。

【使用目的又は効果】

- ・補綴物等の研磨に用いる器材をいう。別に名称を定めるものを除く。

【使用方法等】

- ・本製品をブラシ、バフ、フェルトホイール等に付け、ハンドピースに装備、回転させ断続的に被切削物に押し付けて研磨する。

【使用上の注意】

- ・本製品を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- ・目を保護するために保護めがね等を使用すること。
- ・他の製品と混用して使用しないこと。
- ・本製品を使用し、研磨した粉塵等が目に入らないように注意すること。万一目に入ったときは、すぐに流水で洗浄し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・室温保管
- ・本製品を高温となる場所(ストーブの側、直射日光のあたる場所)に放置しないこと。
- ・本製品は歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社日本歯科商社
製造業者
レンフェルト社(ドイツ)
(英名) RENFERT GmbH