

歯科材料(08) 歯科用石こう及び石こう製品  
一般医療機器 歯科用樹脂系模型材 JMDN34811000

## コンパクトラボパテ

### 【形状・構造及び原理等】(\*)

- ・形状、型式
  - ・1kg セット
  - ・8kg セット
  - ・パテ 1kg
  - ・パテ 8kg
- ・キャタリスト ペースト



キャタリスト ペースト

構成名	性状	成分
シリコンラボパテ	ペースト状	ポリジメチルシロキ酸 二酸化シリコン
キャタリスト(触媒)	ペースト状	珪酸塩スズ合成物 二酸化シリコン

- ・原理：ペースとキャタリストを混ぜ合わせて硬化させ、テック製作・流し込みレジン・歯肉再現法のコア材として使用する。

### 【使用目的又は効果】(\*)

- ・歯科用模型及び修復物の作製過程で用いる各種高分子からなる材料をいう。

### 【使用方法等】(\*)

- ・付属のスプーンですり切り一杯を手に取り、平に押しひろげて、その中心付近にキャタリストのペーストを6cm程加えてください。
- ・鍊和時間は30秒~45秒です。鍊和開始後、約1分半で硬化が始まるのでそれまでに操作を完了ください。約4分で硬化が完了します。
- ・操作時間や硬化時間は気温により若干の時間に違いがあります。気温が高くなると硬化が早く、気温が低いと硬化が遅くなります。

### 【使用上の注意】(\*)

- ・キャタリストの量を多くすると、硬化時間を早くできますが、少なすぎると十分な硬化が得られないので注意すること。
- ・操作時間や硬化時間は気温により若干の時間に違いがあり、気温が高くなると硬化が早く、気温が低いと硬化が遅くなるので注意すること。
- ・キャタリストを長期間使用しない場合、ノズル部分のキャタリストが硬化する場合がありますので、使用する場合は硬化した部分を取り除き、清掃してから使用すること。
- ・本製品が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合は、すぐに流水で洗浄し、医師の診断を受けること。
- ・ラテックスグローブ、ニトリルグローブ、プラスチックグローブ等を装着し、本製品を使用するとグローブ表面処理剤と反応し硬化不良等の異常が出ますので必ず素手で使用すること。(\*)
- ・本製品の使用により、発疹、皮膚炎等のアレルギー性症状を起こした場合は使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。(\*)

### 【保管方法及び有効期間等】(\*\*)

- ・保管温度は25°C以下の暗所に保管ください。
- ・使用期限は包装箱とプラスチック容器に記載されています
- ・本製品は歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】(\*)

製造販売業者  
株式会社日本歯科商社  
製造業者  
デタックス社(ドイツ)  
(英名)DETAX GmbH & Co. KG