

機械器具(25) 医療用鏡
一般医療機器 双眼ルーペ JMDN32692000

ガリレアンルーペマルチ

【禁忌・禁止】

- ・使用者の眼球に有害な影響を与える可能性があるため、レンズを通して太陽、光照射器、レーザー又はそれに準ずる光線を直視しないこと。

【形状・構造及び原理等】(*)

- ・形状、型式
2.5 倍 3.0 倍
Red 2.5 倍 Red 3.0 倍
Pink 2.5 倍 Pink 3.0 倍

プロテクトアイグラス 瞳孔間距離調節ネジ フレームバンド



レンズ固定ネジ レンズキャップ ルーペ

- ・倍率 2.5 倍 焦点距離 420mm 視野径 75mm
- ・倍率 3.0 倍 焦点距離 420mm 視野径 60mm
- 焦点距離は、瞳孔間距離 58mm の場合の焦点距離を示しています。
- ・原理：倍率の違うレンズを使用することにより、作業視野を拡大する。

【使用目的又は効果】

- ・外科処置時に術者が装着する眼鏡に取り付けるレンズから成るシステムをいう。小型望遠鏡として機能し、作業野の拡大像が得られる。観察野に直接光を供給する外部光源と接続することもできる。

【使用方法等】

- ・フレームバンドかラバーバンドのどちらを使用するか選択をする。ラバーバンドを使用する際にはフレームバンドを取外し、ラバーバンドを装着する。
- ・眼鏡を使用している方プロテクトはプロテクトアイグラスの取外しを行う。
- ・本製品を装着する。
- ・瞳孔間距離を調節する。
- ・拡大像を観察し、作業を行う。

【使用上の注意】

- ・本製品を使用して、溶接の火花や太陽光のような強い光、紫外線、赤外線、レーザー光線等を直視しないこと。
- ・本製品は経時変化や使用方法により、ネジの緩みや脱落、

- フレームの破断、レンズの変色や変形、収縮などを起こす場合があるため、使用前には必ず緩み、可動部の異常、レンズの傷、汚れなどを点検し、安全を確認すること。
- ・フレームが肌に触れる箇所で、かゆみ、かぶれ、湿疹などの異常が発生した時は、本製品の使用を止め、医師の診断を受けること。
- ・フレーム部で眼球等を傷つけないように注意して装着すること。
- ・フレームバンドまたはラバーバンドで確実に頭部に固定し、緩みの無い状態で使用すること。
- ・本製品の掛け外しは必ず両手でフレームを持って行うこと。
- ・水洗、浸水、薬液浸漬は行わないこと。
- ・本製品は改造等を行わないこと。
- ・本製品は視野角度を調節することは出来ないでレンズ固定ネジを緩めないこと。
- ・曇止め剤を使用する際にはポリカーボネート素材に対応した製品を使用すること。
- ・プロテクトアイグラスは乾いた布等で清掃を行い、薬液等による清掃は行わないこと。
- ・焦点距離については、瞳孔間距離、遠視・近視等の条件により、個人差が生じることがあります。

【保管方法及び有効期間等】

- ・本製品は清掃したのちにケースへ収納し、火気や水気がなく落下しない安全な場所に保管すること。
- ・極端に温度や湿度の高い場所を避けて保管すること。
- ・ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気による悪影響を受ける恐れのない場所に保管すること。
- ・傾斜のないまたは振動、衝撃などがかからない場所に安定状態にて保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所には保管しないこと。
- ・本製品は、アルコールベースの洗浄剤、強アルカリ性の洗剤で洗浄しないこと(**)
- ・本製品は歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。
- ・本製品を適切に使用する限り 1 年間保証、但し下記の消耗品は 1 年保証の対象外となる。

フレーム(*)
プロテクトアイグラス
ブラックスポンジ
フレームバンド
ラバーバンド
レンズキャップ
ノーズパッド
フリップハンドル
ドライバー
ルーペ袋 清掃布

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社日本歯科商社
製造業者
ソンヤンインターナショナル社(台湾)
(英名) SONG YOUNG INTERNATIONAL CO.