

機械器具 66 歯科用錬成器
一般医療機器 歯科用錬成器具（70682000）
JDS ミキシングチップノズル

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

[保管方法]


- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。
- ・直射日光を避けて保管する。

【形状・構造及び原理等】

形状：S用 先端内径φ0.7mm

SS用 先端内径φ0.5mm

S用

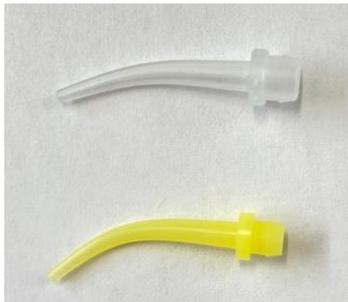

SS用

材質：高密度ポリエチレン

原理：ミキシングチップ内で攪拌練和された材料が本品を通して細部に押し出される

【使用目的又は効果】

練和物を細部へ押し出すため、ミキシングチップの先端に装着して使用する。

【使用方法等】

- 1) ミキシングチップに本品を押し込み装着します。練和物の出方を調整するには、ノズル先端をカッターナイフなどで切断します。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) ミキシングチップに本品が確実に装着されていることを確認してから印象採得を行うこと。[ペーストが漏れたり、ノズルが飛び出す可能性がある]
- 2) カートリッジにミキシングチップが確実に装着されていることを確認してから印象採得を行うこと。[ペーストが漏れたり、ミキシングチップが飛び出す可能性がある]
- 3) 無理な力や角度で装着を行わないこと。
- 4) 本品を用いる場合、接合部に手指を挟まないように注意すること。
- 5) ノズル先端は尖形であるので、取り扱い時には注意すること。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 1) 消毒用エタノール、歯科用ウェットティッシュ以外での薬液を使用した清拭は避けること。[ミキシングチップの変形及び練和物の効果不良の可能性ある]
- 2) 印象材を急激に押し出すと、カートリッジ、ノズルが壊れる恐れがあるので、静かにハンドルを握って印象材を押し出すこと。
- 3) 本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
- 4) 本品は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**製造販売業者
株式会社日本歯科商社製造業者
Tribest Dental Products Co., Ltd. (中国)