

医04 整形用品

一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ 35531000

## ユニシールド

### 再使用禁止

#### 【警告】

可燃性麻酔剤の存在下では使用しないでください。

#### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

セルロース、ポリエステル、レーヨン、ポリプロピレン、ポリエチレン、ブタジエンスチレン、ウレタン、ポリウレタン、ナイロン、アルミニウム、ステンレス、ニッケルクロム、ポリ塩化ビニール、ネオプレンゴム、シリコンゴム、アクリロニトリルブタジエンゴム

#### 【使用目的又は効果】

手術室やカテーテル処置室の汚染(器具やテーブルの上)から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる不織布製の用具をいう。本品は患者を手術中の熱、炎又は他の形態のエネルギーから保護するためにも使用する。本品は単回使用である。

#### 【使用方法等】

1. シートの指示に従ってシートの向きを決め、術野に固定します。
2. 横方向、足側、頭側の順に展開します。

#### 【使用上の注意】

1. 本品の使用は1回限りで、再使用、再滅菌はしないこと。
2. 包装が破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められた場合は使用しないこと。
3. 包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意し安全な方法で処分すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 【保管方法】

水濡れに注意し、直射日光・高温多湿を避け、室温にて保管のこと。

##### 【有効期間】

製造日より3年間又は5年間(個包装ラベルに明記)

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

##### 【製造販売業者】

日昭産業株式会社  
〒105-8567  
東京都港区虎ノ門4-3-13  
TEL. 03-5472-1676