

医03 手術用手袋及び指サック

一般医療機器 天然ゴム製検査・検診用手袋 70977000

## スーパーラテックスグローブ

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

過去に天然ゴムによるアナフィラキシー様症状の既往歴のある医療関係者の使用及び患者への使用を禁止します。

#### \*【形状・構造及び原理等】

本品は天然ゴムを使用しております。

\* 主材料: 天然ゴムラテックス

\* サイズ: SS、S、M、Lサイズ(ボックス上に表示)

\* 形状: 平手タイプ(左右兼用)

\* 滅菌/未滅菌: 未滅菌

#### 【使用目的又は効果】

本品は手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する目的の未滅菌の使い捨て天然ゴム製手袋で1回限りの使用で、再使用はできません。

#### 【使用方法等】

装着する際に破れたり、穴が開く事があるので注意して下さい。

#### 【使用上の注意】

1. 本品はディスプレイ製品です。  
1回限りの使用で再利用しないで下さい。
2. 本品は検査・検診用であり、手術用には使用できません。
3. 天然ゴムによって、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー症状をまれに起こすことがあります。
4. アレルギー症状には、即時型(天然ゴムラテックスに含まれる蛋白によるもの)と遅発型(ラテックス硬化の為に使用される、主として加硫促進剤等の添加物の化学物質によるもの)があります。
5. 天然ゴムと接触する機会の多い方々は天然ゴムアレルギー発症のハイリスクグループと考えられる為、使用には注意して下さい。

6. 本品は熱いものに触れないで下さい。
7. 汚れやその他の外観不良が認められた場合は、使用しないで下さい。
8. 刃物など鋭利は器具に触れると、破れたり穴が開く事がありますので注意して下さい。
9. 薬品、溶剤等によっては、膨潤したり浸透したりする場合がありますので、確認のうえ使用して下さい。
10. パウダー付き手袋に付いているパウダー(コーンスターチ)は、天然ゴムタンパクのアレルゲンのキャリアとなり、まれにアレルギーを誘発する可能性があることや、肉芽腫や術後癒着の形成リスクを高める恐れがあることが報告されています。  
本品パウダー付き手袋をご使用の際は、このリスクを考慮いただきご使用を検討下さいますようお願い致します。

#### \*【保管方法及び有効期間等】

##### 【保管方法】

水濡れに注意し、直射日光や高温の場所を避け、なるべく湿気の少ない涼しい場所に保管して下さい。

##### \*【使用期限】

\* 製造年月より5年後の前月末まで

#### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

##### 【製造販売業者】

日昭産業株式会社  
〒105-8567  
東京都港区虎ノ門4-3-13  
TEL. 03-5472-1676

##### \*【製造販売業者】

国名: タイ

\* 製造業者名: Sri Trang Gloves (Thailand)

Public Company Limited