

医04 整形用品

一般医療機器 医療用不織布 34655000

スイトールC's(シーズ)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 滅菌して使用する場合は、プラズマ滅菌は避ける事
3. 体内へ留置しない事

【形状・構造及び原理等】

1層構造(レーヨン)又は、2層構造(レーヨン、ポリエステル)からなる不織布

【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布からなる被覆・保護材をいう。

【使用方法等】

1. 包装紙から不潔にならないように取り出して下さい。
2. 用途に合わせて、適宜、滅菌処理を行って下さい。
滅菌方法は蒸気滅菌又はEOG滅菌とし、プラズマ滅菌は避けて下さい。
3. 包装紙から取り出し後、又は滅菌処理後、速やかに創傷面の保護、血液・体液の吸収、薬剤の塗布等を行って下さい。

【使用上の注意】

1. 本品は DISPOSABLE 製品です。
1回限りの使用で再使用しないで下さい。
2. 本品は滅菌品ではありません。
3. 本品は適宜、滅菌して使用して下さい。
滅菌方法は蒸気滅菌又はEOG滅菌とし、プラズマ滅菌は避けて下さい。
又、滅菌して使用する場合は、再滅菌しないで下さい。
4. 体内に留置しないで下さい。
5. 包装が開封、破損および汚損している場合や汚れ、その他外観不良が認められる場合は使用しないで下さい。
6. 本品は熱いものに触れないで下さい。
7. 刃物や鋭利な器具に触れると、破れたり穴が開く事がありますので、注意して下さい。

8. 薬品、薬剤等によっては、膨潤または浸透する場合がありますので、あらかじめ確認のうえ、使用して下さい。
9. 開封後は早目に使用して下さい。

*【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

水濡れに注意し、直射日光や高温の場所を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管して下さい。

* [使用期限]

* 製造年月より5年後の前月末まで

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売業者]

日昭産業株式会社
〒105-8567
東京都港区虎ノ門4-3-13
TEL. 03-5472-1676

[販売業者/発売元]

株式会社 イシバシ
〒169-0051
東京都新宿区西早稲田1-5-12
TEL. 03-3203-2618