

機械器具36 医療用ピンセット
一般医療機器 ピンセット JMDNコード:35079001

PSピンセット L

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 本品を折り曲げたり、開いたりすると破損の原因となるので、絶対に行わない事。

【形状・構造及び原理等】

1. 原材料/材質

ポリスチレン樹脂

2. 形状

ピンセットの両先端を閉じ、一定時間経過後、閉じた状態を解除した時、元の状態に戻らなければならない。

3. 構造

ピンセットの先端部は、使用時、両端の先端が一致し、且つ先端がずれてはならない。

【使用目的又は効果】

皮膚や組織、異物等をつまみ、又は把持する為に用いる。

【使用方法等】

使用の際、折り曲げたり、開いたりすると破損しますので行わないで下さい。

【使用上の注意】

- 本品は Disposable 製品です。
1回限りの使用で再使用はしないで下さい。
- 使用前に破損や損傷していないか確認を行って下さい。
- 破損や損傷等の異常が発見された場合は、使用を中止して下さい。
- 過度な力を加えたり、無理な使用をしないで下さい。
- 本品は未滅菌のため、治療行為に使用する際は、使用前に必ず滅菌を行ってから使用して下さい。
- 本品を煮沸消毒、オートクレーブを行うと形状が変形するので絶対に行わないこと。
- 高温の物を挟むことは避けて下さい。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光をや高温多湿な場所を避け、なるべく涼しい所で保管して下さい。

【保管方法及び有効期間等】

2. 有効期間

有効期間は特に定めません。

【取扱い上の注意】

本品を折り曲げたり、開いたりすると破損の原因となるので絶対に行わないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】

日昭産業株式会社

住所: 〒105-8567 東京都港区虎ノ門4-3-13

電話番号: 03-5472-1676

【外国製造業者】

製造業者: TECHNO-PLAS PTY.LTD.

国名: オーストラリア