

機械器具29 電気手術器
一般医療機器 単回使用電極クリーナ JMDNコード:70654000

チップクリーナー

【禁忌・禁止】


- 再使用禁止
- 再滅菌禁止
- 包装が破損している場合は、使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状及び寸法

本品は、『エチレンオキサイドガス滅菌済』である。

【形状】

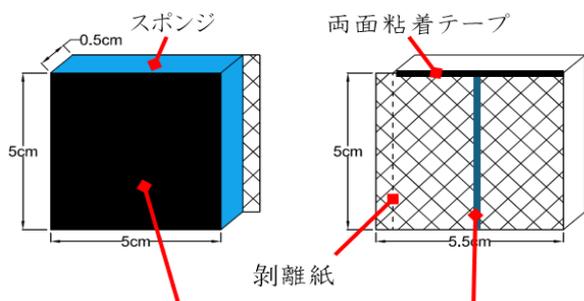

研磨布(研磨面:茶褐色) X線不透過性スレッド

【原理】

研磨面に被研磨物を当て、被研磨物に付着したものを擦り落とす。

【使用目的、効能又は効果】

アクティブ電極を使用した際、電極に付着した炭化物等を除去を目的とした、単回使用のクリーナ。

【品目仕様】

炭化物を除去できる紙ヤスリ様の構造を有し、裏面の粘着テープで覆布或いは器械台に固定できる。

【操作方法又は使用方法等】

1. 汚染に注意して、滅菌包装から本品を取り出す。
2. 本品裏面の剥離紙を剥がし、覆布或いは器械台等に貼り付ける。
3. アクティブ電極の先端部に付着した、炭化物等を本品の研磨面に擦り付けて除去する。この際、過度な力で擦らないこと。
4. 使用後は、適切な方法で廃棄する。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

1. 本品は単回使用の為、再使用しないこと。
2. 本品を使用目的以外の目的で使用しないこと。
3. 万一、包装に破損、汚れ、或いは封入されている製品に破損、異常を認めた場合は使用しないこと。
4. 本品使用後は、本品を安全な方法で処分すること。

【貯蔵、保管方法及び使用期限等】

[貯蔵、保管方法]

1. 水濡れに注意し、直射日光や高温の場所を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管すること。
2. 化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所に保管しないこと。

[使用期限(滅菌有効期限)]

本品の包装に記載。使用期限(滅菌有効期限)を過ぎた製品は使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売業者]

日昭産業株式会社

住所:〒105-8567 東京都港区虎ノ門4-3-13

電話番号:03-5472-1676

[外国製造業者]

製造業者:3A Medical Products Co.,Ltd

国名:中華人民共和国