

医03 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDNコード:70976000

NSプラスチックグローブ

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、ポリ塩化ビニル樹脂を使用しております。

【主材料】

ポリ塩化ビニル樹脂

可塑剤：非フタル酸系可塑剤

(ジオクチルテレフタレート[DOTP])

【サイズ】

ボックス上に表示(S, M, L, LLサイズ)

【形状】

平手タイプ(左右兼用)

【表面仕上げ】

平滑

【滅菌/未滅菌】

未滅菌

【使用目的又は効果】

本品は手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守る為に使用する目的の未滅菌の使い捨てポリ塩化ビニル樹脂製手袋で1回限りの使用で、再使用はできません。

【使用方法等】

装着する際に破れたり、穴が開く事がありますので注意して下さい。

【使用上の注意】

1. 本品は Disposable 製品です。
1回限りの使用で再使用はしないで下さい。
2. 本品は、検査・検診用であり、手術用には使用できません。
3. 本品を使用中に、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー症状が現れた場合は、直ちに使用を中止し、医師による適切な処置を受けて下さい。
4. 手袋の主材料であるポリ塩化ビニル樹脂は、高い熱により破損する可能性があるため、60℃以上の熱いものに触れないで下さい。

5. 汚れやその他の外観不良が認められた場合は、使用しないで下さい。

6. 刃物など鋭利な器具に触れると、破れたり穴が開く事がありますので注意して下さい。

7. 薬品、溶剤等によっては、膨潤したり浸透したりする場合がありますので、確認のうえ使用して下さい。

【貯蔵、保管方法及び使用期限等】

【貯蔵、保管方法】

水濡れに注意し、直射日光や高温の場所を避け、なるべく湿気の少ない涼しい場所に保管して下さい。

【使用期限】

製造年月より、5年

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】

日昭産業株式会社

〒105-8567 東京都港区虎ノ門4-3-13

電話番号:03-5472-1676

【外国製造業者】

Hebei Handform Medical Products Co., Ltd.

(中華人民共和国)