

機械器具（14） 打診器 コード：11950000

一般医療機器 一般的名称 打診器

打診器

【警告】

【使用方法】

本製品は未滅菌品である。必ず適切な方法で消毒してから使用すること。（【保守・点検に係る事項】の項参照）

【禁忌・禁止】

【使用方法】

- ① 本製品を曲げ、切削、打刻（刻印）等の二次的加工（改造）することは、折損等の原因となるので絶対に行わないでください。

**【形状・構造及び原理等】

本品は、主に以下のような基本形状があります。包装されている製品の製品名・カタログ番号及びサイズ・基本形状については、直接被包に記載されている。

1. 形状：基本形状はステンレス製ハンドルをもち、先端にゴム製ハンマーの付いた医療器具です。

勝沼式タイプ



テーラー式タイプ



2. 原材料：
ステンレス鋼とゴム（勝沼タイプ）
ステンレス鋼とシリコンゴム（テーラータイプ）
ステンレス鋼とゴム（エコタイプ）
3. 原理：反射を検査するため身体に力を伝達する為に用いる。

【使用目的、効能又は効果】

本製品は、神経学的検査に使用する医療機器です。

【操作方法又は使用方法等】

本品は未滅菌の状態 で供給される。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 使用前に必ず洗浄（保守・点検に係る事項参照）すること。
- 2) 使用目的（手術・処置等の医療行為）以外の目的で使用しないこと。また、折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の（応力）を加えないこと。

2. 不具合・有害事象

長時間生理食塩水や血液にさらさないで下さい。又次の化学薬液は腐食や孔食を起こしますので注意してください。

塩化アンモニウム・塩化バリウム・塩化カルシウム・塩化第一鉄・塩化水銀・塩化第一スズ・チオシアン酸カリウム・過マンガン酸カリウム・次亜塩素酸ナトリウム・石灰酸・デキシン液・塩素化石灰・王水・ヨウ素・フェノール 等

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 1) 貯蔵・保管にあたっては、腐食を防ぐために保管期間の長短にかかわらず必ず乾燥をすること。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用者による保守点検事項

- 1) 使用後は、血液、体液、組織等の汚物が付着した場合はできるだけ早く除去し、職業感染防止のために洗浄・消毒すること。
- 2) 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥すること。
- 3) 使用（滅菌）前に、汚れ、傷、曲がり、歯の損傷、可動部の動き等に異常がないか点検すること。
- 4) 強アルカリ／強磁性洗剤・消毒剤は、器具を腐食させるおそれがあるので、使用をさけること。
- 5) 本品の滅菌には下記の方法を推奨する。
エチレンオキサイドガス滅菌の場合
温度：50～60℃
湿度：60～100%
エチレンオキサイドガス濃度：580～730mg/L
暴露時間：4 時間
エアレーション：12 時間

【包装】

1 本/袋

*【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

日本フリッツメディコ株式会社
〒270-0163 千葉県流山市南流山 6 丁目 9 番地 3 号
TEL: 04-7158-5155 FAX: 04-7158-5157
<http://www.frigzmj.com>
(外国製造所の氏名又は名称及び国名)
DR・FRIGZ INTERNATIONAL (PVT) LTD.
ドクター・フリッツ インターナショナル社
パキスタン