

機械器具 2 5 医療用鏡

一般医療機器 内視鏡用部品アダプタ 37090010

販売名 OXEI ライトガイドケーブル LG-7000X

【禁忌・禁止】

- ・ 消毒等再処理せずに使用しない [感染のリスク]
- ・ 改造しないこと [重篤な傷害リスク]
- ・ 導光を直視しないこと [眼球傷害のリスク]
- ・ MRI 近傍で使用しないこと [身体損傷のリスク]

【形状・構造及び原理等】

[寸法誤差：±10%]

チューブ長さ 300cm



有効径φ3.5mm

- ・ 最小曲げ半径：5 cm
- ・ 電撃に対する保護の程度：CF 形

*下表の構成品は補充用に単品でのご注文が可能です。

連番	名 称	機 能
①	内視鏡用コネクタ	硬性内視鏡の接続口
②	 Storz アダプタ 05.0108z	内視鏡を接続するためのアダプタ
③	コネクタ	ライトガイドアダプタ AL-7000X 用のコネクタ
④	 Storz アダプタ AR-7000X	内視鏡を接続するためのアダプタ
⑤	 ライトガイドアダプタ AL-7000X	③に光源装置 BL-7000X を接続するためのアダプ タ
—	チューブ	光源装置からの光を伝送 する。

【使用目的又は効果】

本品は、光源からの光を捕捉し、内視鏡に導光します。

【使用方法等】

1.1 目視検査

- (1) 外観を目視し、損傷が無いことを確認してください。鋭利な端あるいは角、膨張、粗面、又はチューブ表面のシリコン被覆に損傷が確認されるものは、使用しないこと。
- (2) チューブ片方の端を室内の照明光に向け、もう一方の端から内部を目視し、15%以上が暗くなっているものは、使用しないでください。また、ファイバー内部の表面の汚れ、擦り傷など無いことを確認すること。

1.2 接続

- (1) 本品の手元側に、適合するアダプタを介して光源装置を正しく接続して固定します。
- (2) 他方先端側に、適合するアダプタを介して内視鏡を正しく接続して固定します。

2 使用終了後の清浄前処理

- (1) 両側のアダプタを取り外します。
- (2) 糸くずの出ない湿らせた布（滴らない布）で、術後の汚れを拭き取ってください。
- (3) 柔らかく糸くずの出ない布を使用して、本品を拭き取って乾かします。
- (4) 6 時間以内に再処理して、次の使用に備えます。

【使用上の注意】

本品に接続可能な機器は、以下をご使用ください。

名称	モデル	認証番号等
光源装置	BL-7000X	303AABZX00059000
内視鏡	RL-100, RL-130, RL-145, RL-500, RL-530	307AABZX00030000

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 耐用期間 5 年(自己認証による。)

【保守・点検に係る事項】

- ・ 使用前に洗浄・消毒してください。
 - ・ 超音波洗浄槽による洗浄は、行わないでください [損傷するリスクがあります]。
- 詳細は、取扱説明書をお読みください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：JTP 株式会社

TEL: 03-6772-8088

製造業者：SCHÖLLY FIBEROPTIC GMBH(ドイツ)