

添付文書

2021年10月（第4版）*

製造販売届出番号 27B2X00110000003

2017年6月（第3版 新記載要領に基づく改訂）

一般医療機器 医 80 はりまたはきゅう用器具
再使用可能な毫鍼（JMDN コード 35207001）

「ユニコ平軸皮内鍼」


【警告】

本品は医家向け医療機器ですから医師および鍼灸師以外の人は使用しないで下さい。

【禁忌・禁止】

- ① アレルギー体質、特異体質、糖尿病、脊椎ヘルペス、妊婦の方は使用しないで下さい。
- ② 使用前に鍼を点検してください。湾曲や損傷などがある場合には使用しないで下さい。

【形状、構造及び原理等】

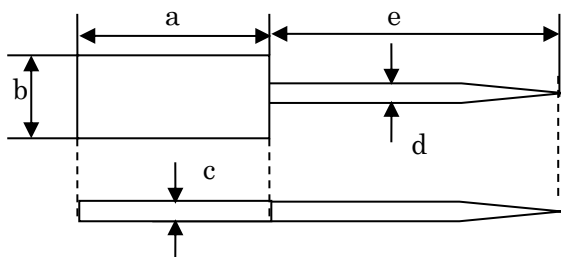

構造名称及び寸法 *

No.	鍼柄の長さ	鍼柄の幅	鍼柄の厚み	鍼体の直径	鍼体の長さ
1	3.3	1.2	0.5	0.14	3.0
2				0.14	5.0
3				0.16	3.0
4				0.16	4.0
5				0.16	5.0
6				0.16	6.0
7				0.16	7.0
8				0.12	1.5

（単位 mm）

製品仕様

ステンレス鋼を使用していますので、長時間の在庫、150℃～180℃の飽和蒸気下における滅菌処理により、材質の劣化、表面における錆発生はありません。

【使用目的又は効果】

鍼灸用の毫鍼

外科的麻酔、疼痛緩和、又は他の治療効果を促進するため、末梢神経を刺激する細長く先の尖った再使用可能な器具であって、滅菌済みを除いた器具をいう。

【使用方法等】

・操作方法又は使用方法は鍼灸師等専門家による鍼治療を行うための方法による。

・鍼の材料は医療用として使用されています良質のステンレス鋼線を使用していますが、細線で曲がり易く、又苛酷な処理条件下では損傷の可能性がありますので、取り扱いには注意してください。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

本品は製造時に清潔に洗浄、乾燥されていますが念のため使用前に殺菌・消毒を行ってください。

【取り扱い上の注意】

鍼の大きさが小さいので、紛失しないように取り扱いには注意してください。

【保管方法及び有効期間等】

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿の場所にはおかないで下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者及び製造業者

名 称：日進医療器株式会社

住 所：大阪市中央区道修町1-4-2

電 話 番 号：06-6223-1781