

添付文書

2014 年 11 月 第 4 版（新記載要領に基づく改訂）
2013 年 1 月 第 3 版

届出番号 27B2X00110000008

医 04 整形用品
一般医療機器 救急絆創膏 JMDN コード 34864000

エルモ救急バン

再使用禁止

【警告】

●使用中または使用后


本品の使用により発疹・発赤・かゆみ・かぶれ等の症状が現れた場合には使用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。

【禁忌・禁止】


再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

救急絆創膏は粘着テープ、パッド、セパレーターからなる。
平面図

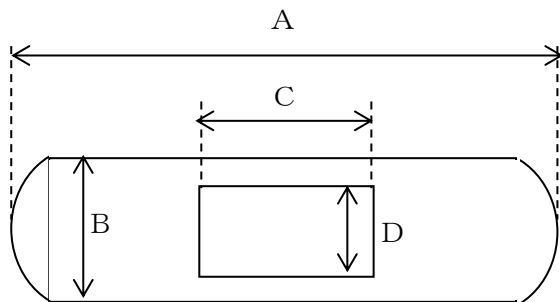

断面図

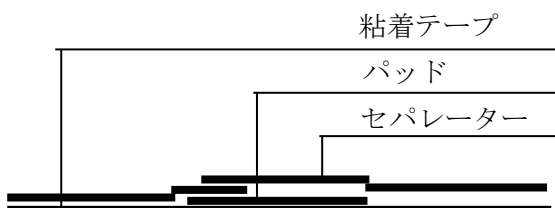

製品	A	B	C	D
M	72	19	23	12
L	72	30	30	21

(mm)

【使用目的又は効果】

切り傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ等の軽微な創傷面の保護、手術後の縫合部の被覆保護、注射針等の穿刺部被覆保護を主たる目的としたもの。

【使用方法等】

被覆してある両端の剥離紙（セパレーター）をはぎ、中央のパッドに触れないようにして、パッドが傷口を保護するように貼り付ける。

【使用上の注意】

●重要な基本的注意

1. 単回使用
2. パッドの部分が濡れたり、又は汚れたまま放置すると傷の治りが悪くなるので貼り替えてください。
3. 患部を清潔にし、パッド部分を汚さないように注意してください。
4. 粘着面を患部に貼らないでください。
5. 小児に使用させるときは、保護者の指導監視のもとに使用させてください。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光のあたらない、湿気の少ない清潔な場所に保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者

名称：日進医療器株式会社

第二種医療機器製造販売業

住所：大阪府大阪市中央区道修町 1-4-2

お問い合わせ先：弊社お客さん相談室

電話：06-6223-0133

外国製造業者

国名：中華人民共和国（China）

名称：Jiangsu Nanfang Medical Co.,Ltd.

（邦名）じゃんすうなんふあんめでいかる