

添付文書

2017年4月（第2版：新記載要領に基づく改訂）

届出番号 27B2X00110000019

2011年10月（第1版）

一般医療機器 医04 整形用品
救急絆創膏（JMDNコード34864000）

ハイドロイドバンドLEd

再使用禁止

【警告】

以下の場合、医師の診断を受けること

- ・ 感染が見られる傷（感染が見られる傷とは、傷口の周りが赤くなり、ズキズキした痛みが続いたり、膿をもっていたり、熱や腫れ等の以上が認められる傷のこと。）
- ・ 感染を起こす可能性のある傷。感染を起こす可能性のある傷とは次のような傷です。
深い刺し傷、筋肉、骨、腱が見えるような傷
動物や人にかまれた傷。
ガラス、木材、砂、ほこり、衣服の繊維など異物が入り込んだ傷
受傷してから時間が経ち、傷口が乾燥している場合。（特に翌日になってからのご使用はおやめください。）
- ・ にきび、湿疹、虫刺され、皮膚炎などの症状
- ・ 目の周囲、粘膜。
- ・ かさぶたができている傷。（はがすときに製品がかさぶたにくっつくなどして、再び傷つけるおそれがあります。）


【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止
- ・ 本品を切って使用しないでください。
- ・ 一枚で覆いきれない傷には使用しないでください。傷よりも大きいサイズの製品を使用してください。
- ・ 傷に塗布する軟膏、クリーム及びヨードトンキ等の殺菌・消毒剤を本品と併用しないでください。（使用した場合は、水道水でよく洗い流してください。）
- ・ 2歳以下の乳幼児には使用しないでください。
- ・ 糖尿病や血行障害を感じていたり、発熱があるなど全身状態が良くない人は、使用前に医師または薬剤師に相談してください。

【形状、構造及び原理等】

本品は、ポリウレタンフィルムに、吸水体として粘着性を持ったハイドロコロイド素材のパッドをラミネートしたものとセパレーターからなる。

平面図

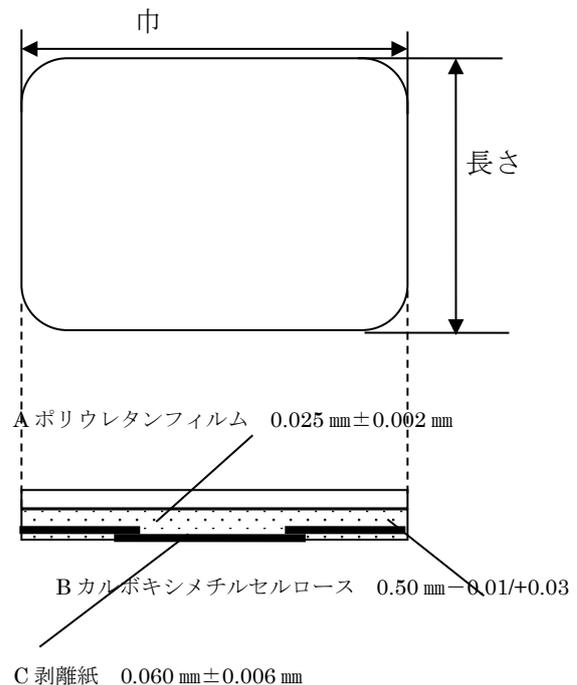

製品	長さ (mm)	巾 (mm)
製品(1)	80	100
製品(2)	100	160

<製品仕様>

項目	値
粘着力	幅 12 mm 当たり 1.48N 以上
吸水性	初期重さの 50% 以上 (24 時間)
引張強度	幅 12 mm 当たり 9.8N 以上
水蒸気透過性	>200 g/m ² /24 h

【使用目的又は効果】


切り傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ等の軽微な創傷面の保護、手術後の縫合部の被覆保護、注射針等の穿刺部被覆保護を主たる目的としたもの。

【使用方法等】

- ① 本品を包装紙から取り出し、両手で約1分間温めてください。貼付したときに皮膚へのなじみがよくなります。
- ② 中央の保護紙をはがしてください。

添付文書

- ③ 両端の保護紙を持ち、粘着面を傷にあてながら保護紙をはがしてください。
- ④ 本品を傷にあてたあと、確実に粘着するように、手のひらで約1分間おさえて温めてください。

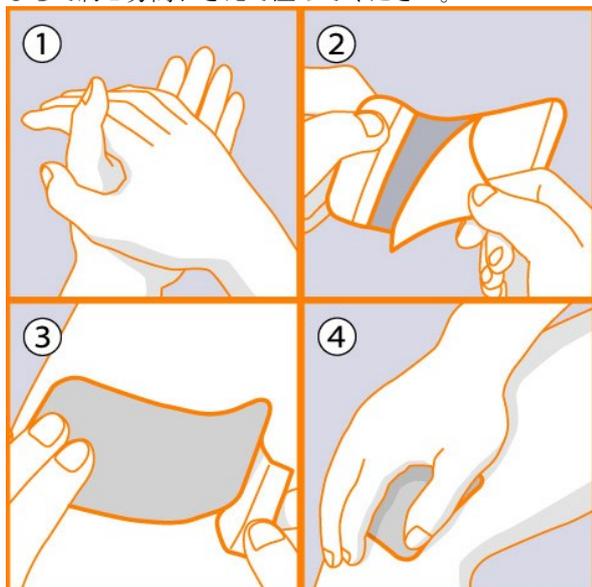

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者

名称：日進医療器株式会社

第二種医療機器製造販売業

住所：大阪府中央区道修町1-4-2

電話：06-6223-1030

外国製造業者

国名：台湾

名称：T r i d a C o., L t d.

【使用上の注意】

1. 単回使用
2. 傷に塗布する軟膏、クリーム及びヨードチンキ等の殺菌、消毒剤を本品と併用しないこと。使用した場合は水道水で残さないようによく洗い流すこと。
3. 一枚でおおいきれない大きさの傷には使用しないこと。傷の大きさより大きい製品を使用すること。
4. 小児に使用させるときは、保護者の指導監視のもとに使用させてください。また、2歳以下の乳幼児には使用しないでください。
5. 本品は外用ですので、内服しないでください。

次の場合は、使用を中止し医師に相談してください。

1. 本品の使用により、傷の悪化、化膿、感染（傷口の周りが赤くなっていたり、ズキズキした痛みが続いたり、膿をもっていたり、熱や腫れ等の異常が見られる場合）。
2. 本品の使用中に傷口の周りに、発疹、発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合。
3. 4日以内に傷の治癒がみられない場合。

【保管方法及び有効期間等】

1. 小児の手の届かないところに保管してください。
2. 直射日光のあたらない、湿気の少ない清潔な場所に保管してください。
3. 本品の使用期限は4年です。使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。