

医 04 整形用品

一般医療機器 救急絆創膏（34864000）

エルモ救急バン ブルー

再使用禁止

【警告】

●使用中または使用後

本品の使用により発疹・発赤・かゆみ・かぶれ等の症状が現れた場合には使用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。


【禁忌・禁止】

再使用禁止


【形状、構造及び原理等】

救急絆創膏は粘着テープ、パッド、セパレーターからなる。

平面図

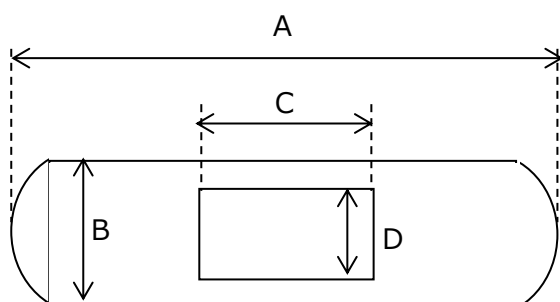

断面図

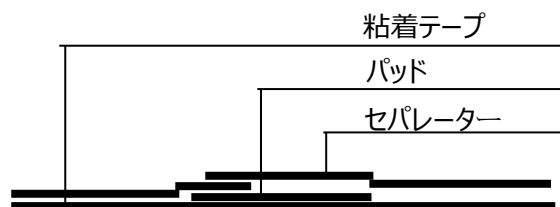

サイズ A : 72 mm B : 19 mm C : 23 mm D : 13 mm

【使用目的又は効果】

切り傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ等の軽微な創傷面の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

【使用方法等】

1. 傷及びその周囲の皮膚を水道水などで洗浄し、水気を良くふき取って清潔にしてください。
2. 被覆してある両端の剥離紙（セパレーター）をはぎ、中央のパッドに触れないようにして、パッドが傷口を保護するように貼り付ける。
3. はがす時は、ゆっくりはがしてください。

【使用上の注意】

<使用注意>（次の人には慎重に適用すること）

絆創膏などによりかぶれやすい人やアレルギー体質の人。

<重要な基本的注意>

1. パッドの部分が濡れたり、又は汚れたまま放置すると傷の治りが悪くなるので貼り替えてください。
2. 患部を清潔にし、パッド部分を汚さないように注意してください。
3. 粘着面を患部に貼らないでください。
4. 使用中または使用後に、発疹・発赤・かゆみ・かぶれ等の症状が現れた場合には使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。
5. 小児に使用させるときは、保護者の指導監視のもとに使用させてください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 小児の手の届かないところに保管してください。
2. 直射日光のあたらない、湿気の少ない清潔な場所に保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：日進医療器株式会社

第二種医療機器製造販売業

住所：大阪府中央区道修町 1 - 4 - 2

電話：06-6223-1030

製造業者

名称：Jiangsu Nanfang Medical Co.,Ltd.

国名：中華人民共和国