

添付文書

作成 2019 年 1 月 (第 1 版)

届出番号 27B2X00110000041

医 04 整形用品

一般医療機器 救急絆創膏 (34864000)

エルモキズあてパッド

再使用禁止

【警告】

●使用中または使用後

本品の使用により発疹・発赤・かゆみ・かぶれ等の症状が現れた場合には使用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。

【禁忌・禁止】

再使用禁止


【形状、構造及び原理等】

1.概要


救急絆創膏は粘着テープ、パッド、剥離紙、からなる。

2.形状及び構造

平面図 (本体)

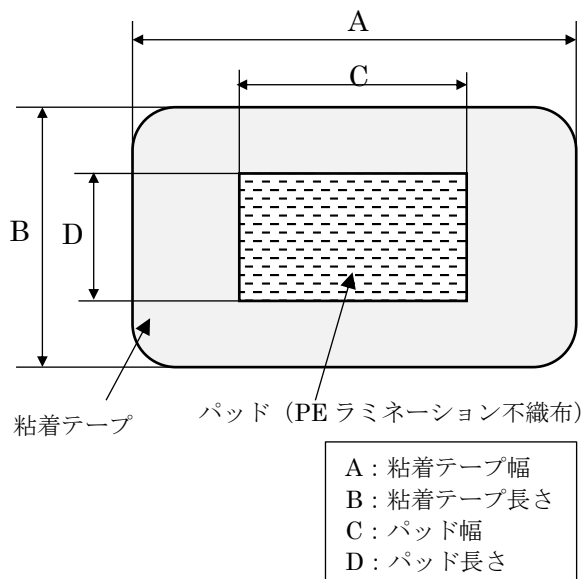

断面図 (製品構成)

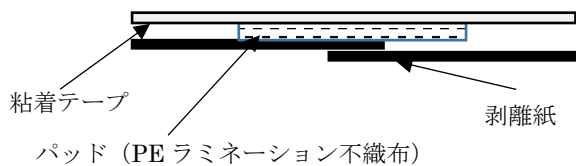

3.原材料

部材	原材料
粘着テープ	ポリエステル不織布にアクリルゴム粘着剤を塗布
パッド	レーヨン不織布とポリエチレンメッシュのラミネーション
剥離紙	グラシン紙

体に接触する部分の組成：

粘着テープ：アクリルゴム粘着剤 (パッド部除く)

パッド：ポリエチレンフィルム

4.種類及び寸法

品番	粘着テープ		パッド	
	A 幅	B 長さ	C 幅	D 長さ
L サイズ	100	80	50	40
M サイズ	80	60	40	30
S サイズ	70	50	40	25

公差：すべて±1.0 mm

単位mm

<原理>

接着剤を付した布製又はプラスチック製の絆創膏材にパッドを付した絆創膏で、パッド部分を創傷部にあてて貼付することで、傷の被覆および保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等を行う。

【使用目的又は効果】

切り傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ等の軽微な創傷面の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

【使用方法等】

1. 傷及びその周囲の皮膚を水道水などで洗浄し、水気を良くふき取って清潔にしてください。
2. 被覆してある両端の剥離紙 (セパレーター) をはぎ、中央のパッドに触れないようにして、パッドが傷口を保護するように貼り付ける。
3. はがす時は、ゆっくりはがしてください。

添付文書

【使用上の注意】

＜使用注意＞（次の人には慎重に適用すること）

絆創膏などによりかぶれやすい人やアレルギー体質の人。

＜重要な基本的注意＞

- 1.パッドの部分が濡れたり、又は汚れたまま放置すると傷の治りが悪くなるので貼り替えてください。
- 2.患部を清潔にし、パッド部分を汚さないように注意してください。
- 3.粘着面を患部に貼らないで下さい。
- 4.使用中または使用後に、発疹・発赤・かゆに・かぶれ等の症状が現れた場合には使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。
- 5.小児に使用させるときは、保護者の指導監視のもとに使用させてください。

【保管方法及び有効期間等】

- 1.小児の手の届かないところに保管してください。
- 2.直射日光のあたらない、湿気の少ない清潔な場所に保管して下さい。

＜製造番号又は製造記号＞

外箱に記載

＜有効期間＞

外箱に記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：日進医療器株式会社

第二種医療機器製造販売業

住所：大阪市中央区道修町 1 - 4 - 2

外国製造業者

国名：中華人民共和国

名称：

（英名）Jiangsu Nanfang Medical Co.,Ltd.

（邦名）江蘇南方衛材医薬股份有限公司