

添付文書

2019年8月（第1版）

届出番号 27B2X0011000044

医 04 整形用品
 一般医療機器 医療用不織布（34655000）

フプレ眼帯用滅菌パッド

再使用禁止

【警告】

●使用中または使用後
 本品の使用により発疹・発赤・かゆみ・かぶれ等の症状が現れた場合には使用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。

【禁忌・禁止】


再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

1.概要

本品は、創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう。

2.形状及び構造

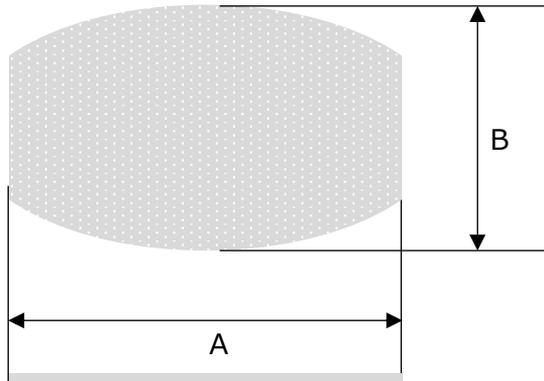

3.原材料

部材	原材料
本体	不織布とポリエチレンメッシュのラミネーション

体に接触する部分の組成：

ポリエチレン

4.種類及び寸法

A 幅	B 長さ
80	60

公差：すべて±1.0 mm

単位mm

＜原理＞

創傷又は外科切開部に軽く押し当て、被覆・保護する。

【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置する際の被覆・保護材として用いる。

【使用方法等】

創傷又は外科切開部にあて、サージカルテープ等で固定する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 1.表示されている使用期限までに使用してください。使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。
- 2.使用は1回限りとし、再使用、再滅菌はしないでください。
- 3.個包装により無菌が保たれています。包装がすでに破損または汚損していた場合は、使用しないでください。
- 4.使用前に本品を点検してください。損傷などがある場合には使用しないでください。
- 5.包装開封後すぐに使用しなかった場合、無菌保証ができなくなります。開封後使わなくなった製品は使用せず廃棄してください。
- 6.使用中または使用後に、発疹・発赤・かゆみ・かぶれ等の症状が現れた場合には使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。

【保管方法及び有効期間等】

- 1.小児の手の届かないところに保管してください。
- 2.直射日光のあたらない、湿気の少ない清潔な場所に保管して下さい。

＜製造番号又は製造記号＞ 外箱に記載

＜有効期間＞ 外箱に記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：日進医療器株式会社

第二種医療機器製造販売業

外国製造業者

国名：中華人民共和国

名称：

(英名) Jiangsu Nanfang Medical Co.,Ltd.

(邦名) 江蘇南方衛材医薬股份有限公司