

医 03 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋（70976000）

ペリーグローブ ウレタン


再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

本品は、手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する合成素材製手袋である。ポリウレタン製で左右兼用、パウダーフリーである。

形状：平手タイプ

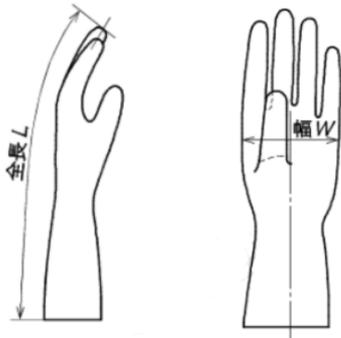

(サイズ)

品種	幅（許容差±5）	長さ（以上）
SS	75	230
S	85	
M	97	

単位 mm

(体に接触する部分の組成)

手袋本体：ポリウレタン

(原理)

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合に用いるポリウレタン製の手袋で、本品を着用することで、患者及び使用者を交差感染から守る。

【使用目的又は効果】

本品は、手術を除いた、歯科の診察、治療、処置及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する手袋である。

【使用方法等】

- 包装紙より取り出し、手に装着する。本品は、左右共通のデザインになっているので、手の大きさに合ったものを使用する。
- 使用後は、取り外し本品を廃棄する。

＜使用方法に関する使用上の注意＞

刃物など鋭利な器具に手袋が触れると、破れたり穴が開くことがあるので注意してください。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 使用期限の過ぎたものは使用しないでください。
- 適切なサイズを選択し使用すること。
- 使用前に本品に穴、破損、損傷等がないことを必ず確認してください。異常が認められる場合は使用せず、また、使用中に異常が発生した場合直ちに使用を中止し、新しものに交換してください。
- 指輪やアクセサリ、付け爪などを外してから使用してください。
- かゆみ、かぶれ、発疹等の症状が現れた場合直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
- 薬品、薬剤等によっては膨潤したり、浸透、変質したりするおそれがあるので確認の上ご使用ください。
- 本品は使い捨てです。繰り返しのご使用はご遠慮ください。

【保管方法及び有効期間等】

- 直射日光のあたらない、湿気の少ない清潔な場所に保管して下さい。
- 室温に保管すること。
- 本品の有効期間は3年（自己認証による。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

氏名：日進医療器株式会社

第二種医療機器製造販売業

TEL 06-6223-0133

製造業者

名称：BLUE SAIL MEDICAL CO.,LTD

中華人民共和国