

添付文書

作成日 令和 6 年 3 月（第 1 版）

医療機器製造販売届出番号 27B2X00110000050

類別 機械器具 80 はり又はきゅう用器具

一般医療機器 家庭用貼付型接触粒（JMDN コード 71026000）

ユニコ 金粒

再使用禁止

【警告】

飲み込んだ場合、すぐに医師に相談してください


【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止
- ・ 本品を分解したり、改造をしないでください。
- ・ 傷や湿疹、かぶれ等のある部位には使用しないでください。
- ・ 皮膚の弱い所や粘膜には貼らないでください

【形状、構造及び原理等】

(1)構造について

円型の粘着テープ中央部に粒状の硬質物を固定させた構造である。

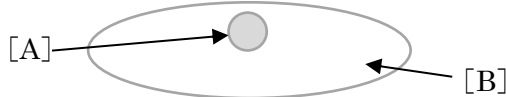

・ 各部の寸法（単位 mm）

No.	[A]：硬質物（金粒） の直径	[B]：離型紙付き粘着テ ープの径
1	0.8	12×11
2	1.2	
3	1.5	

mm

・ 体に接触する部分の組成

硬質物：ステンレス球に金メッキ／粘着剤：アクリル系粘着剤

(2)動作原理

粘着テープの中央に硬質物を付し、体のコリ部分に貼付することより圧迫し、「コリの解消」を目的とする。

【使用目的又は効果】

家庭において、粘着テープの中央に粒状の硬質物を付し、身体のコリの部分に貼付することにより圧迫し、「コリの緩解」を目的とする。

【使用方法等】

(1)貼付方法

- 1) 皮膚の汚れや汗を拭き取り、皮膚を清潔にして使用ください。
- 2) 離型紙より粘着テープを剥がしてください。
- 3) コリや痛みのあるところを指で押さえて痛みや不快感のひどい箇所に、皮膚に直角に正しく貼り付けてください。十分に貼付されていないと粘着テープが浮き上がり剥がれやすくなります。

＜使用法に関する使用上の注意＞

入浴時は、貼付箇所をタオル等で強くこすらないで下さい。剥がれたり、ケガの原因になることがあります。入浴後、剥がれていないこと

を確認してください。

(2)取り外し方法

取り外しはできるだけ静かに剥がしてください。急に剥がすと皮膚を傷めることがあります。

【使用上の注意】

(1)使用前の注意事項

- ・ しばらく使用しなかった機器を使用するときは、機器表面に金属などの異物が吸着していないことを確認してから使用してください。
- ・ 小児及び監督を必要とされる方への使用は、保護者の指導の下で使用してください。

(2)使用中に注意すること。

- ・ 身体に異常を感じたときには、使用を直ちに中止してください。
- ・ 装着部に発しん（疹）、発赤、かゆみなどの症状が表れた場合は、使用を直ちに中止してください。
- ・ 万一飲み込んだ場合は、すぐに医師の診断を受け、指示に従ってください。
- ・ 使用しても効果が現れない場合、医師または専門家に相談してください。

(3)使用後に注意すること。

- ・ 使用済の製品は、硬質物を紛失しないよう粘着テープにくるんでから、地域で定められた条例に従って廃棄してください

【取り扱い上の注意】

- ・ 本品を分解したり、改造しないでください。
- ・ 使用後は、すぐに捨ててください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿の場所を避け保管して下さい。
- ・ 小児及び監督を必要とする方の手の届かない場所に保管してください。
- ・ 使用できる標準的な期間は 3 年です。

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者：日進医療器株式会社

住所：〒541-0045
大阪府大阪市中央区道修町
1 丁目 4 番 2 号

お客様相談室：06-6223-0133

（土・日・祝を除く 10：00～17：00）