

添付文書

2015 年 6 月 16 日（第 1 版）

届出番号 27B2X00110A00035

類別 医 04 整形用品
一般医療機器 手術用被覆・保護材 JMDN コード 34654000
(救急絆創膏 JMDN コード 34864000)

オスモエイド P

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1 形状及び構造

本品は、浸透圧吸収性シートの両端に貼付箇所固定するための粘着テープを付した被覆・保護材である。

2 動作原理

パッド部分を創傷部にあてて貼付することで、傷の被覆および保護を行う。

3 サイズ

製品番号	サイズ	パッドサイズ
784202	9×16 cm	9×13 cm
784212	13×21.5 cm	13×18 cm

【使用目的又は効果】

術後創傷のための被覆保護及び傷の被覆、保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等を行う。

【使用方法等】

1 創部は、必要に応じて消毒、生理食塩水等で洗浄をし、十分に清潔にしてください。

2 適切なサイズの本品を選び、包材より本品の患部接触面に触れないように取り出してください。

3 本品の患部接触面を創傷面にあて、左右いずれか一方の剥離紙を剥がし、粘着部分を傷口の周りの皮膚に貼付し、本品がしわにならないように伸ばしながら傷口に密着させ、もう一方の剥離紙を剥がし粘着部分を傷口の周りの皮膚に貼付して固定してください。

【使用上の注意】

1 重要な基本的注意

- (1) 傷口に明らかな感染症状（痛み、発赤、腫れ、発熱、発疹、かゆみ）が認められる場合は使用しないでください。
- (2) 本品の使用中に、創傷部及び貼付箇所の周囲で、本品が原因と思われる感染症状が起きた場合には、使用を中止

滅菌済

し、適切な治療を行ってください。また、患者の全身状態の悪化等により感染症状が現れる場合もあるので、感染の兆候に十分注意し、感染が認められた場合には、使用を中止し、適切な治療を行ってください。

(3) やけどに使用する場合、面積が手のひらより大きい、大きな水泡ができていたり、低温やけどの場合は、適切な治療を行ってください。

(4) 本品の使用中に、滲出液による浸軟（ふやけ）や皮膚障害、皮膚剥離を起こすことがあり、使用時に十分な観察を行い、このような症状が認められた場合は、直ちに使用を中止し、適切な治療を行ってください。

(5) 貼付後は、傷口を定期的に観察し、滲出液の量や傷口の状態に応じ、適切な交換及び処置を行ってください。

(6) 交換時に剥がす時は、皮膚への刺激が強くないように注意して剥がしてください。なお、固着等が発生して剥がしにくい場合には、必要に応じて水等を染み込ませたガーゼなどで貼付面をぬらしてから剥がしてください。

(7) 眼、口腔内などの粘膜器官には使用しないでください。

2 その他の注意

(1) 本品開封後は、直ちに使用してください。開封したまま長時間放置すると、パッド部分が乾燥し貼付しにくくなります。

(2) 本品は、再滅菌しないでください。

(3) 軟膏、クリーム、オイル等の薬剤と併用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

1 保管方法

直射日光のあたらない、湿気の少ない清潔な場所に保管してください。

2 使用期限

本品の使用期限は 3 年（自己認証による）です。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：日進医療器株式会社

〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町 1 丁目 4 番 2 号

電話：06-6223-0133