

機械器具 15 舌圧子
一般医療機器 舌圧子 14066000

メンテ IPP 舌圧子 1TD-14

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は天然木を細長い板状に加工し、滅菌した製品です。

寸法 140mm×15mm

【使用目的又は効果】

口腔内、咽喉内の検診等に使用する。

【使用方法等】

口腔内に挿入し、舌を押さえるために使用する。

【使用上の注意】

（重要な基本的注意）

- 本品は滅菌済ですので、包装に破れや汚染している疑いがある場合には使用しないでください。
- 包装を開封した後は速やかに使用してください。
- 本品の使用は 1 回限りです。
- 使用先の部位を傷つけないよう無理な力をかけないでください。
- 製品に破損や折れ曲がり、汚れなどがあった場合には使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて清潔な場所に保管してください。

使用期限：容器又は被包に記載してあります。

〔自己認証（社内データ）による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：日本綿棒株式会社

埼玉県熊谷市江波 412

お問合せ窓口 TEL 03-3573-1884