

機械器具54 医療用捲綿子
一般医療機器 医科用捲綿子 10172000

メンティップ 病院用綿棒 CTB-1512P

再使用禁止


【禁忌・禁止】 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、紙軸の片側先端に綿球がついた検体採取用の綿棒です。検体採取に使用する綿棒がキャップに固定されており、プラスチック製の試験管内に収められています。滅菌済の製品です。

軸の材質	綿球の材質	軸の直径	綿球の径
紙製	コットン及びレーヨンの混紡	2.6mm	12.0mm

試験管の材質	キャップの材質
*ポリプロピレン	ポリエチレン

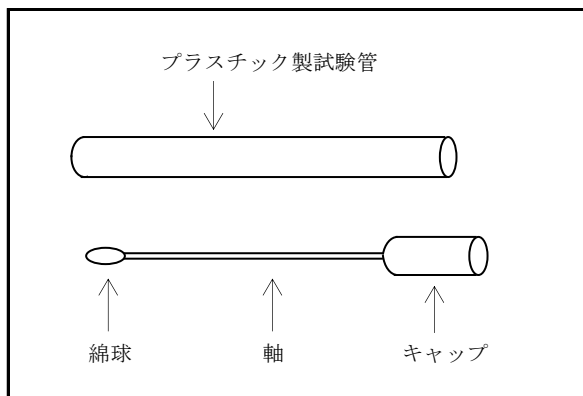

【使用目的又は効果】

綿棒で検体を採取し、プラスチック試験管に入れて輸送します。滅菌済のため、そのまま直ちに使用できます。

【使用方法等】

使用する直前に包装を開け、綿棒のキャップ部分を持ち、綿球部分で検体を採取します。プラスチック試験管に入れてキャップをし、輸送します。

【使用上の注意】

（重要な基本的注意）

- 1) 本品は滅菌済ですので包装が破損していない限り滅菌状態が保たれています。外袋が開封、破損していたり、ピンホールなどがあった場合には使用しないでください。
- 2) 包装を開封した後はすみやかに使用してください。
- 3) 本品の使用は1回限りです。再使用しないでください。
- 4) 本品を使用目的以外に使用しないでください。
- 5) 本品を使用するときは、力を入れ過ぎたり、強く押し太りして軸を折らないようにご注意ください。
- 6) 検体を採取するとき、採取する粘膜などの部位を傷つけないよう、無理な力をかけないでください。
- 7) 本品は、検体の保存容器ではありませんので、採取後はすみやかに検査に供してください。
- 8) 検体採取後はすみやかにプラスチック試験管に入れ密封して二次汚染のないように輸送してください。
- 9) 全ての検体は病原菌に汚染されているものとして取り扱いってください。
- 10) 使用後は感染防止のために検査室等の処理基準に従って廃棄処分してください。

【保管方法及び有効期間等】

貯蔵方法：水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて清潔な場所に保管してください。

使用期限：包装袋に記載

〔自己認証(社内データ)による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：日本綿棒株式会社

お問い合わせ窓口 TEL 03-3573-1884