

機械器具 54 医療用捲綿子  
一般医療機器 医科用捲綿子 10172000

## メンテ IPP 病院用綿棒 CAPD-50

### 再使用禁止

---

#### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

本品は、軸の先端に綿球がついた医療用綿棒とガーゼで構成されており、滅菌済の製品です。

綿球部の材質：コットンとレーヨンの混紡

軸部の材質：天然木製

寸法：全長 155mm/綿球径 12mm/軸の直径 2.5mm

ガーゼの材質：コットン 100%

#### 【使用目的又は効果】

薬剤の塗布や治療のために使用します。

#### 【使用方法等】

1. 使用する直前に包装を開けます。
2. 綿棒に消毒液を含ませ、腹部のカテーテル出口やカテーテルを消毒します。ガーゼは腹部のカテーテル出口を覆うようにあて、テープなどで固定します。

#### 【使用上の注意】

(重要な基本的注意)

- 1) 本品は滅菌済み (EOG 滅菌) ですので、包装に破れや汚染している疑いがある場合には使用しないでください。
- 2) 製品に破損や折れ曲がり、汚れなどがあつた場合には使用しないでください。
- 3) 包装を開封した後は速やかに使用してください。
- 4) 本品の使用は 1 回限りです。再使用しないでください。
- 5) 本品を使用する際には、手指を十分に消毒し汚染防止に配慮してお使いください。
- 6) 本品を使用するときは、力を入れ過ぎたり、強く押したりして軸を折らないようご注意ください。
- 7) 使用後は感染防止に留意し衛生的に処理してください。

#### 【保管方法及び有効期間等】

貯蔵方法：水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて清潔な場所に保管してください。

使用期限：容器又は被包に記載してあります。

[自己認証 (社内データ) による]

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：日本綿棒株式会社

お問合せ窓口 TEL 03-3573-1884