

機械器具 54 医療用捲綿子
一般医療機器 医科用捲綿子 10172000

メンテ IPP 病院用綿棒 1PZ4720

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、プラスチック製軸の先端に綿球がついた滅菌済医療用綿棒です。

綿球部の材質：ポリエステル

軸部の材質：ポリプロピレン

寸法：全長 152.0mm / 綿球径 3.0 mm

軸の直径：本体部(太部)2.5mm / 先端部(細部)1.1mm

【使用目的又は効果】

薬剤の塗布や治療のため、或いは検体採取などに使用する。

【使用方法等】

綿球部分を汚染しないように個包装を開けて適宜使用する。

【使用上の注意】(重要な基本的注意)

- 1) 本品は滅菌済ですので、個包装に破れや穴などがあった場合には使用しないでください。
- 2) 包装を開封した後は速やかに使用してください。
- 3) 本品の使用は1回限りです。再使用しないでください。
- 4) 凍結や加熱をしないでください。
- 5) 本品に破損や折れ曲がり、汚れなどがあった場合には使用しないでください。
- 6) 綿棒による検体の採取は、十分習熟した人の指示のもとに実施してください。
- 7) 本品を使用するときは、力を入れすぎたり、強く押し下りして綿棒の軸を折らないようご注意ください。
- 8) 検体を直接採取する場合は、採取する粘膜などの部位を傷つけないよう無理な力をかけないでください。
- 9) 検体を採取した後は速やかに検査を実施してください。
- 10) 全ての検体は病原菌に汚染されているものとして取り扱ってください。
- 11) 使用後は感染防止のために、検査室等の感染性廃棄物の処理規定に従って廃棄してください。

【保管方法及び有効期間等】

貯蔵方法：水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて清潔な場所に保管してください。

小児の手の届かないところに保管してください。

使用期限：容器又は被包に記載してあります。

[自己認証(社内データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：日本綿棒株式会社

お問合せ窓口 TEL 03-3573-1884